

アクリル系レジン  
最終仕上げ用  
ポイント登場！！



# SB POINTS

歯科用ゴム製研磨材 SBポイント



CA用

最終  
仕上げ用

研磨後  
不要

SBポイントはアクリル系レジンの最終仕上げ研磨用に開発したシリコンポイントです。アクリル系レジンに適した研削素材を採用することで、短時間で滑沢な面が得られます。




歯科用ゴム製研磨材

## SBポイント (一般医療機器)

医療機器届出番号 25B2X00005000004

6本入り 標準価格 ¥1,800

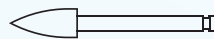

全長	27.0mm
作業長	9.0mm
作業部最大径	4.0mm

### 使用上の注意

- 推奨回転速度 10,000min<sup>-1</sup> 前後の 低速回転
- 最高回転速度 15,000min<sup>-1</sup>
- 必ず注水下でご使用ください。
- 形態修正、荒研磨等には使用しないでください。

### 滅菌について

- オートクレーブ、ケミクレーブ又はEOGによる滅菌が可能です。(乾熱滅菌は避けてください)
- 薬液による滅菌が可能です。ただし塩素系消毒剤は錆が発生することがありますので、長時間浸さないでください。

## 関連製品



歯科充填用アクリル系レジン  
**ボンドフィルSB** (管理医療機器)  
医療機器認証番号 222AFBZX00133000



歯科接着用レジンセメント  
**スーパーボンド** (管理医療機器)  
医療機器認証番号 221AABZX00115000



歯科汎用アクリル系レジン  
**プロビスタ** (管理医療機器)  
医療機器認証番号 220AFBZX00245000

歯面処理材 ティースプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00100000

■ご使用の際は、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表記記載は2016年3月22日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

**サンメディカル株式会社**

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

SBポイントの情報がご覧いただけます。

[www.sunmedical.co.jp](http://www.sunmedical.co.jp)

サンメディカル

検索

スマートフォン  
からのアクセス  
はコチラ →



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金 (祝日を除く) 午前9:00～午後5:30