

歯科材料05 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント 70838002

## カチャックス

### 【禁忌・禁止】

本材又は本材に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと(使用上の注意の項参照)。

### 【形状・構造及び原理等】

以下の構成成分があり、記載の成分を含有します。

構成成分(内容量)	性状	組成
ベースペースト(35g)	白色ペースト	酸化亜鉛、酸化マグネシウム、その他
キャタペースト(16g)	黄色ペースト	脂肪酸ダイマー、その他

付属品: 練和紙

[JIS T 6610:2013]

タイプ1(仮着)

硬化時間: 1.5~10分

[原理]

本品はベースペーストとキャタペーストを混合・練和することにより、金属酸化物と脂肪酸が反応して硬化する。

### 【使用目的又は効果】

暫間クラウンやブリッジの仮着に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 練和紙上にベースペーストとキャタペーストを等長に押し出します。仮着する補綴物の大きさにより、量を加減します。重量による混合比率は2.2:1.0になります。
- 2) 約30秒間、練和紙上の各ペーストを練和します。この場合の操作時間は、練和終了後、約2分30秒です。
- 3) 形成歯面および装着する補綴物の内面を乾燥します。
- 4) 練和したペーストを装着する補綴物の内面に盛り、装着します。
- 5) 本材が硬化した後(約2分)、余剰部分を除去します。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 大きな補綴物の場合、先述の配合量にベースペーストを10~20%加え、セメントの硬さを調整すること。
- 2) ベースペーストとキャタペーストは、購入時の組合せ通りに使用し、どちらかが残った場合は使用せずに破棄すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ①他の製品と混合して使用しないこと。
  - ②使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合はうがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
  - ②本材に対する過敏症の既往歴のある術者は、歯科用グローブ等を着用し、直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
  - ③本材を口腔粘膜、皮膚及び目に接触させないように十分注意すること。口腔粘膜、皮膚に付着した場合はすぐにアルコール綿等で拭き取り、多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
  - ④使用するにあたっては、患者の個人差も考慮して症例に適合するかどうかを判断して使用すること。
- 3) 不具合・有害事象
 

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生することがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避け、室温(1℃~30℃)にて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本体に記載の使用期限\*までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証(製造元データ)による。]

※(例 ◻○○○○-△△は使用期限○○○○年△△月を示す。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: サンメディカル株式会社

住所: 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2

電話番号: 077-582-9980

フリーダイヤル: 0120-418-303(FAX共通)

電話受付時間 月~金(祝日を除く)午前9:00~午後5:30

ホームページ: <http://www.sunmedical.co.jp>

製造業者: Cavex Holland BV

国名: オランダ