





MSコートFを適用した歯面を乳酸水溶液に30分間浸漬させ、カルシウム溶出の抑制率を算出した。しゅう酸水溶液と比較して約1.7倍の抑制効果が確認できる。

製品	カルシウム溶出抑制率 (%)
MSコートF	47.7%
しゅう酸水溶液	2.8%

MSコートF しゅう酸水溶液
サンメディカル(株)測定データ

フッ化ナトリウムが耐酸性を向上させ酸による脱灰を抑制するの！

ホワイトニング前後の知覚過敏抑制にも使える上、便利なワンポトル！

歯面清掃

フェルトチップの先端を広げ液を十分に浸み込ませる。

MSコートFのこすり塗り

エアードライ

洗口完了

先端を押し広げ たっぷり 浸み込ませる

こすり塗り

5秒こすり塗りでも効果を発揮しますが、30秒こすり塗りすることでさらに効果が大きくなります。

エアードライ時に痛みが残っている場合は、痛みが消失するまで当日の治療内で、こすり塗りとエアードライを2~3回繰り返して行います。

操作手順はとっても簡単よ!

痛みが治まったよ

乾燥し あとは水洗いで完了よ!

こすり塗りして

形成後の知覚過敏には **ハイブリッドコートII**!

20秒間 乾かないように

歯肉は粘膜保護材等で保護してください。

コートブラシによる混合液の塗布 (20秒間)

レジンコーティング型で痛みを抑える事が出来るわ

うわわっ おい! ちよっと 何を!

そして!

※塗布後、エアブロー、光照射

知覚過敏症には「しゅう酸」と「MSポリマー」で痛みを抑制する **MSコートシリーズ**!

おー! しみない!

◆登場する人物は架空のものです。

製品ラインナップ

☆カルシウム反応型で痛みを抑える!

歯質に存在するカルシウム成分と化学反応し、高分子保護被膜を形成します。
それにより、歯質表面のみならず象牙細管や象牙質に至る微小亀裂の内部を緊密に封鎖し、知覚過敏を抑制します。

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート F セット

■製品構成

MSコート F(5mL).....1本
フェルトホルダー.....1本
フェルトチップ.....100本
プラスチックダッペン.....20枚

フッ素
配合



●医療機器認証番号 223AFBZX00044000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

■標準価格 ¥9,800

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート ONE セット

■製品構成

MSコート ONE(5mL).....1本
フェルトホルダー.....1本
フェルトチップ.....100本
プラスチックダッペン.....20枚



●医療機器認証番号 221AFBZX00007000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

■標準価格 ¥9,800

☆レジンコーティング型で痛みを抑える!

歯質表面に薄く、硬く、しなやかな被膜を形成し、疼痛や二次う蝕から歯質を保護します。
シーリング・コーティング材の他に知覚過敏抑制材、ボンディング材としても使用可能です。

歯科用シーリング・コーティング材

ハイブリッドコートⅡセット

■製品構成

リキッド(5mL).....1本
コートスポンジ.....160粒
コートブラシ.....10本
V型ダッペン.....5枚

シーリング
コーティング

知覚過
敏抑制

ボンディング



■標準価格 ¥17,000

●医療機器認証番号 221AFBZX00106000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきまして予告なく変更になることがあります。
■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2015年4月21日現在のものです。 価格に消費税はふくまれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

 **サンメディカル株式会社**

本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

製品の情報や操作ステップなどがご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ →



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30