

5分でわかる

SUN MEDICAL

スーパーボンド®EX

Super-Bond EX


Dental Adhesive Resin Cement









漫画：いわや晃





青木 美鳥 (17)
舞羽第一高等学校 2年

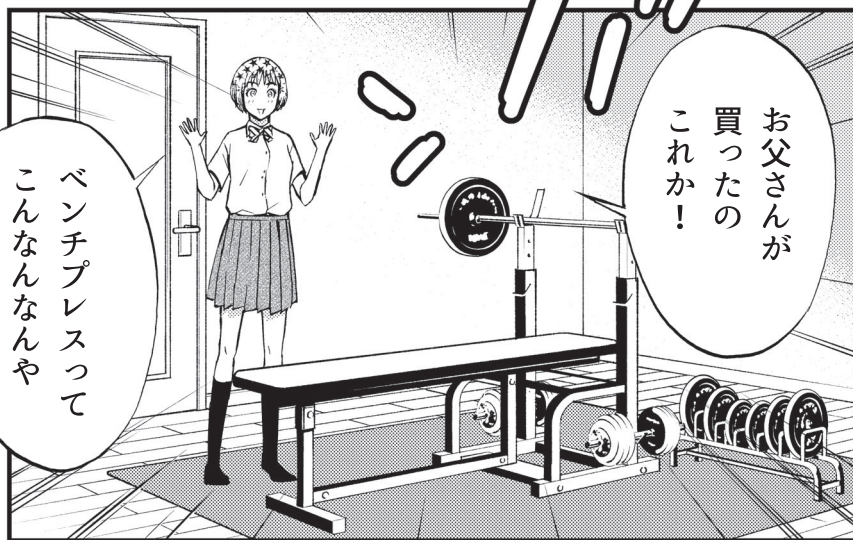

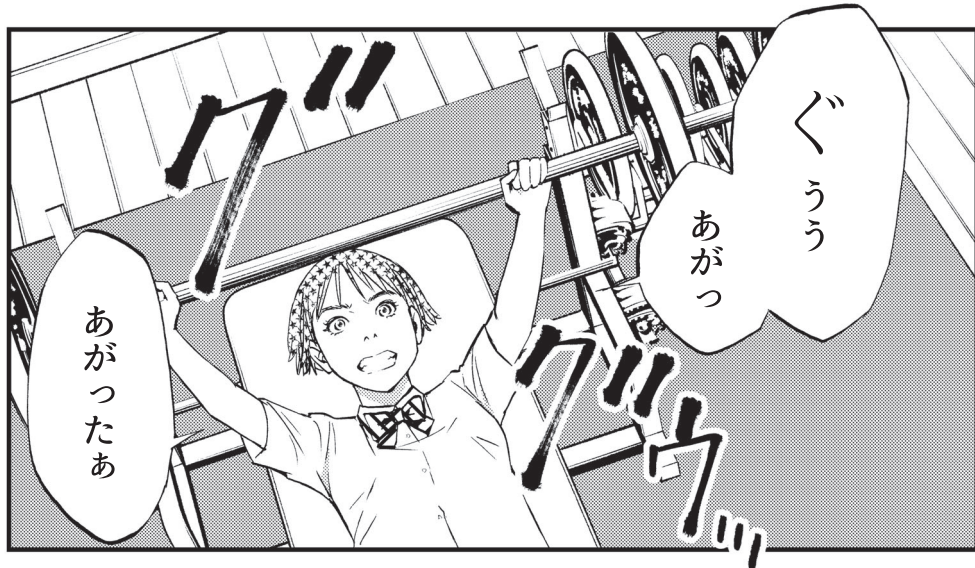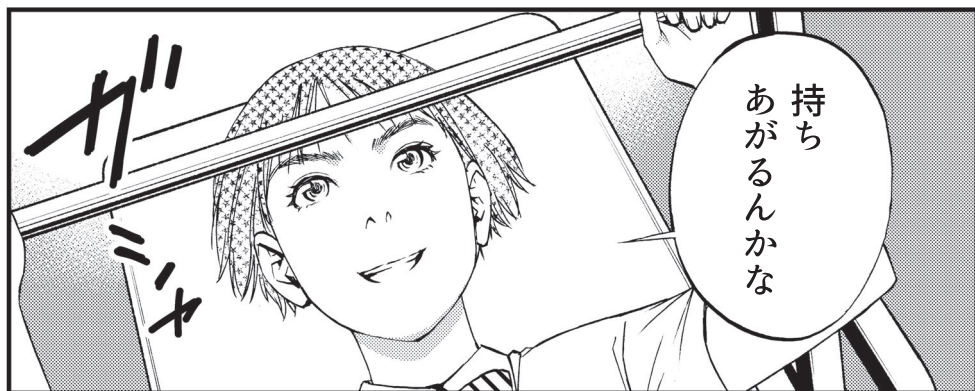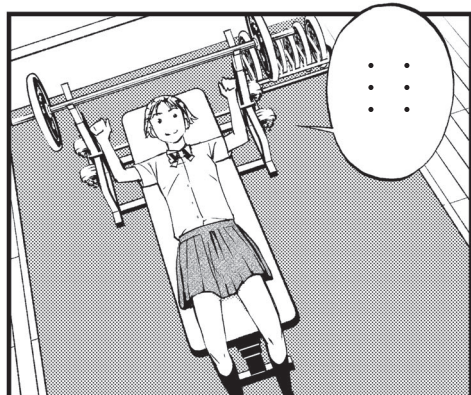

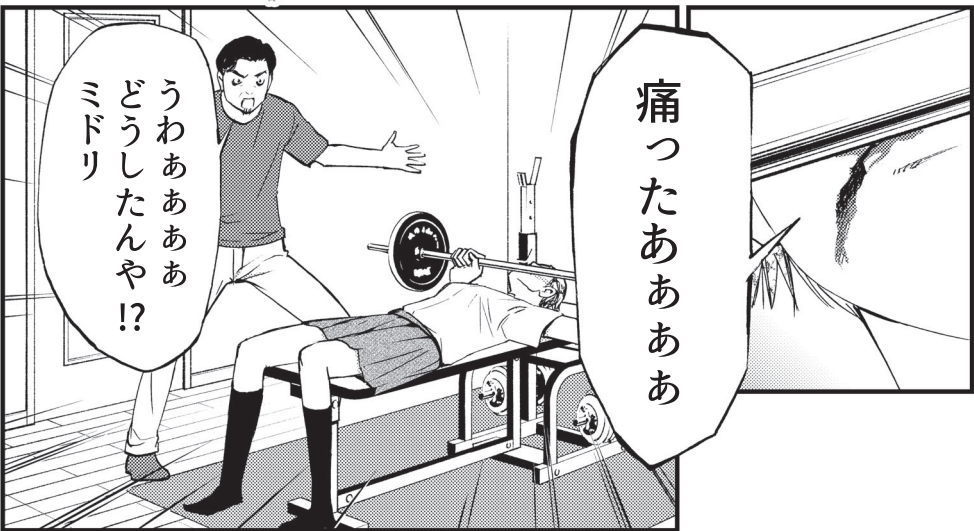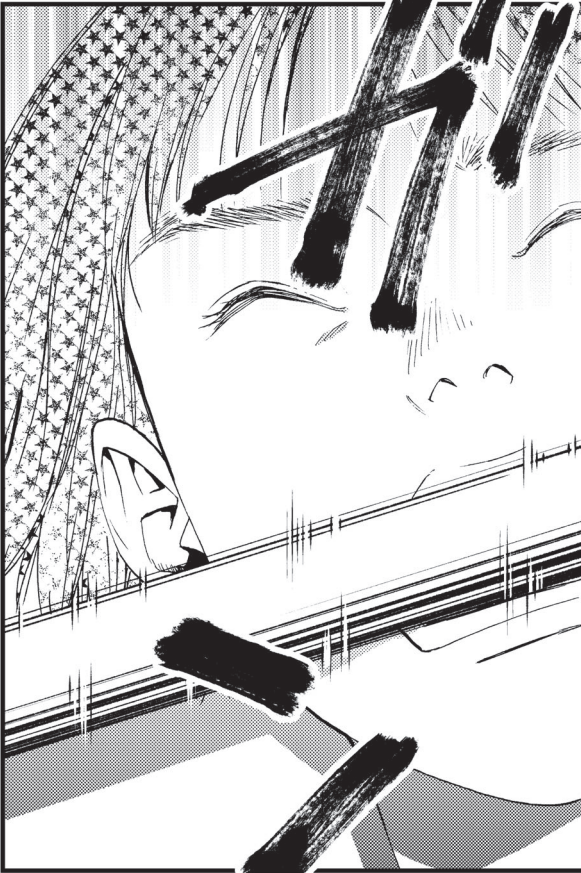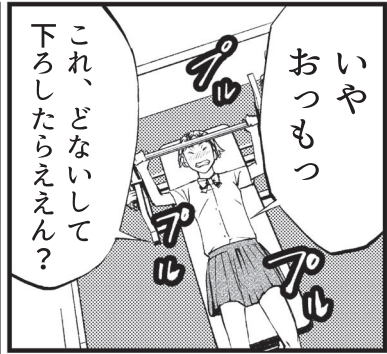


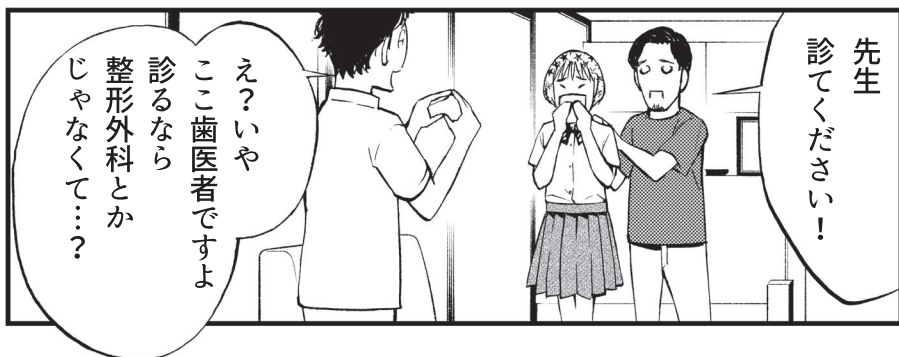

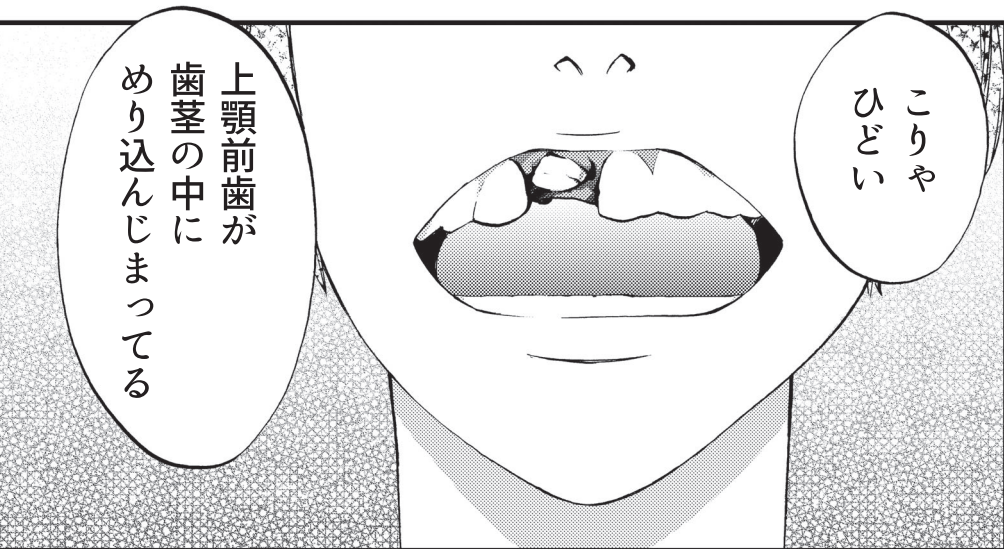

上顎前歯が
歯茎の中に
めり込んじまってる

こりや
ひどい

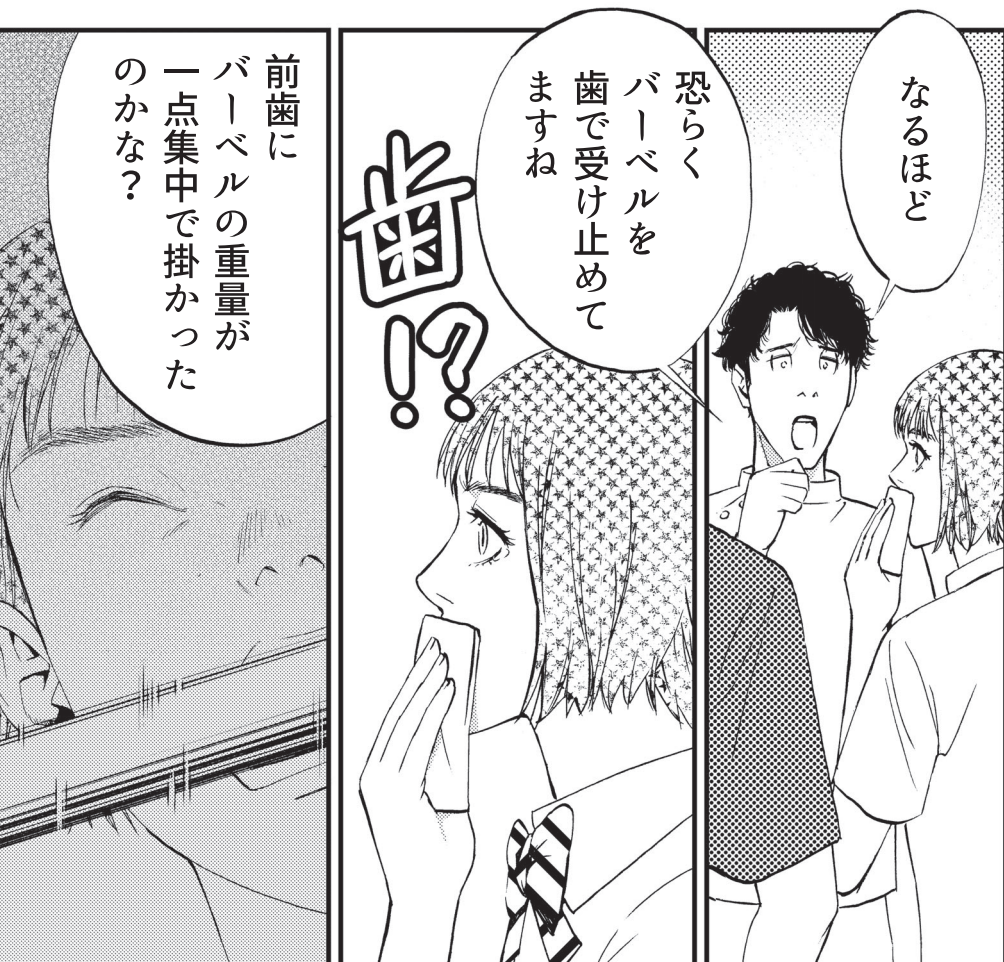

前歯に
バーベルの重量が
一点集中で掛かった
のかな?

恐らく
バーベルを
歯で受け止めて
ますね

なるほど

歯!
!?





そして
隣在歯との
仮固定には
もちろん...


よしよし
ひっぱり
出すぞ
よし
無事
整復できた！



新しくなった
この「スーパーボンドEX」を
使う

OK！
すぐ用意
するわ



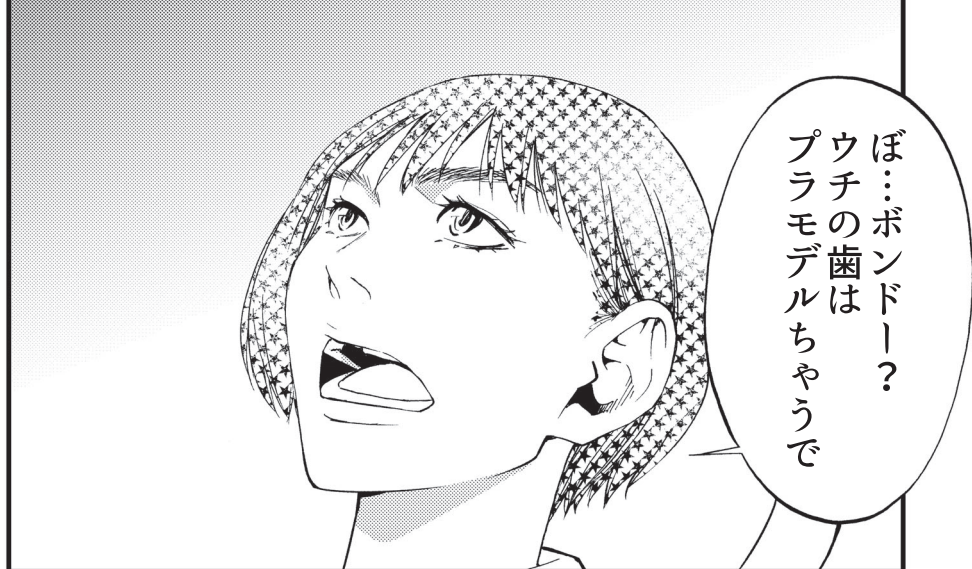

ぼ…ボンドー？
ウチの歯は
プラモデルちゃうで



歯質の前処理には
「**ティースプライマー**」を
使う
水洗が不要だし
操作も簡単だしな



工作で使う
ボンドじゃなくて
歯科用の接着材よ



「**スーパーボンドEX**」で
固定する前に
まずは歯の前処理だ


外傷歯の
固定だから
筆積法ね



別のカップに
「クイックモノマー液」
4滴に



まずカップに
筆積操作がし易い
「EXポリマー粉末」を
適量入れる

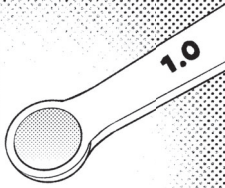

「キャタリストV」を
1滴まぜて



筆積法で
外傷歯を
仮固定と…


軟組織裂傷部の
縫合は
私にまかせて

ぼーっと
見てないで
連結用の
ワイヤーの準備！

おっとー

おしっ
ワイヤーで
隣在歯と
連結して…

ここでもう一度
「スーパードEX」で
がっちり固定だ…

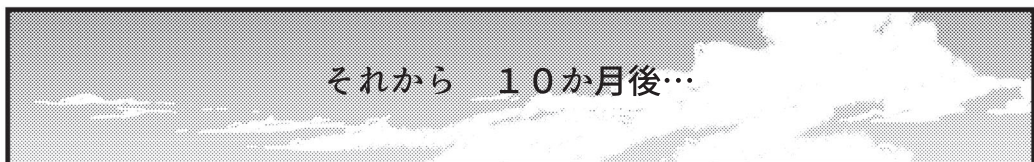

さらに10か月後――

ウチこの前な
靴買いにアリプラザ行つて
そこにめちやくちや
イケメン店員がいて
「いくつですか？」つて
聞かれてん

ナンパされたと
思つたら
足のサイズやつてん！

毎度毎度うるせーな
根管充填や支台歯形成は
ページの都合上割愛したつ
てのによ

今日はいよいよ
「スーパーボンドEX」
の固定を外す日
なんだぜ


色々あったんだけど……

ウチの歯を
支えてくれた
これと
お別れすんのは
ちよつと
寂しいわう
もはや相棒と
呼べる存在

お別れつて
わけじゃないぜ
これからは
このCAD/CAM冠の装着に
「スーパーボンドEX」を
使うからな


固定だけ
ちやうの？

【一般的な化学重合レジンの場合】

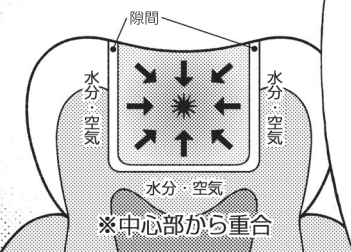

一般的な化学重合型
レジンの場合
歯質に残る水分などが
接着阻害となるため
隙間がでやすい

【「スーパーボンドEX」の場合】

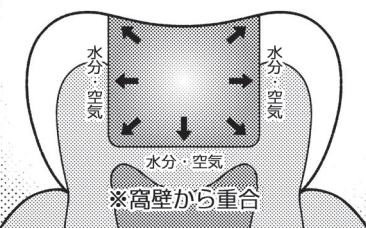


しかし
「スーパーボンドEX」なら
水分や空気がある所でも
高い接着性を発揮できる

当たり前だ
「スーパーボンドEX」を
動揺歯固定にしか
使わないなんて
スマートフォンを
通話にしか使ってない
みたいなもんだぜ



不思議だと思うだろ？
なぜ水と空気があっても
高い接着性が
発揮できるのか？
その最大のポイントは
この「キャタリストV」にある！

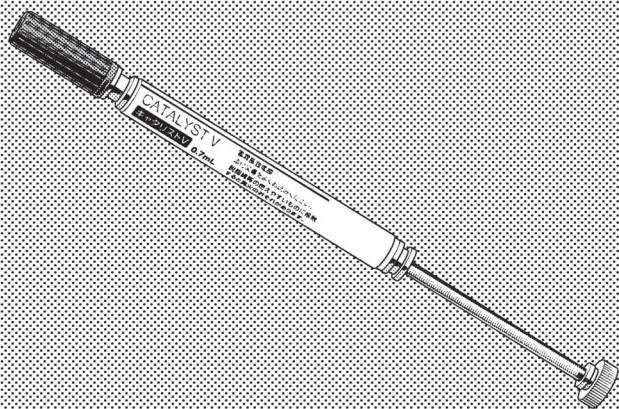

水と空気に
反応して重合する
「TBB」という
重合触媒を
採用しているのさ

つまり

「スーパーボンドEX」
は補綴物の接着にも
有効ってことだ！

水 空気

まず支台歯と
補綴物の内面を
清掃後
前処理をするんだが

歯質に対しては
「ティースプライマー」

今回のような
CAD/CAM冠や
貴金属・ポーセレン
ジルコニア等の補綴物には
この「M&Cプライマー」が
適しているぜ！



CAD／CAM冠の
装着だから
「スーパーボンドEX」は
混和法で操作する！

「クイック
モノマー液」
4滴


「キャタリストV」
を1滴

そして、ダッペンを
冷やさずに使える
「EXポリマー粉末」だ
容器を振ってから
軽く擦り切り1杯
入れて混ぜる！

「スーパーボンドEX」は適度
なとろみで移送しやすいのさ！
CAD／CAM冠の装着以外に
もインレーや…

うるさいわね！
治療中に
ぺらぺら
喋ってないで
さつさと
CAD／CAM冠の
装着して
あげなさいよ

は
い
い
い
い
い
！

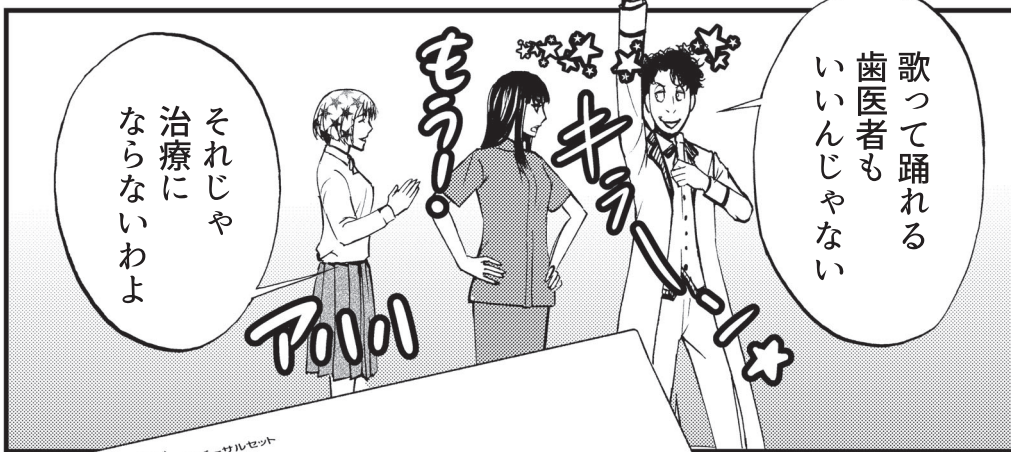

アーティスト紹介

いわや 晃

Akira Iwaya

プロフィール

職業：漫画家・イラストレーター

出身：北海道



2000年月刊少年ジャンプにてデビュー。

サンメディカル「5分でわかる漫画資料シリーズ」を担当。

代表作にキャラクター（小学館）、シノギゴロシ（秋田書店）、闇に踊る手（集英社）FAKE 京都・鶴舞町・質屋控（LINEマンガ）等 多数

2023年LINEマンガにてお笑い芸人を主人公とした『2ピン芸人』を連載。

本作に登場した「青木美鳥」は、『2ピン芸人』のヒロイン「青黄ミドリ」の高校時代として描かれている。

また過去のサンメディカル漫画のキャラクターが多数登場。



(C)2023 Otona Daishow, Akira Iwaya / ICE Inc. All rights reserved.

この物語はフィクションです。登場する人物・医療機関等は架空のものです。
また治療方針を推奨するものではありません。
材料の使用については、診断に基づいて適切にご使用ください。

スーパーボンド®EX実習付き説明会のご案内



「混和法はいつ、どう使う？」
「キャリストVとモノマー液の比率は変えられる!？」

実習を交えて使用方法をお伝えします!

「CAD/CAM冠の装着に使える?」

「余剰セメントの除去でいい方法はないの?」

接着データや症例写真を交えてご紹介します!

■ 費用 無料

■ 説明内容

- ・スーパーボンドEXの特長・種類による使い分け
- ・実習（筆積・混和）
- ・CAD/CAM冠装着に対する有効性

など

■ 所要時間 約60分

説明内容・所要時間はご希望に応じて調整いたします。

■ 日時 希望日時をご連絡ください。

■ 会場 会場のご用意をお願いします。

10名様以上でお申し込みください!
詳しくは担当者にお問い合わせください。

お申込みは
コチラ

0120-418-303 (FAX共通)

電話受付時間 月～金（祝日を除く）午前9:00～午後5:30

ホームページからもお申込みいただけます。

www.sunmedical.co.jp サンメディカル

検索

歯科接着用レジンセメント スーパーボンドEX（管理医療機器） 医療機器認証番号 303AKBZX00055000
歯科接着用レジンセメント スーパーボンド（管理医療機器） 医療機器認証番号 221AABZX00115000
歯面処理材 ティースプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 222AFBZX00100000
歯科セラミックス用接着材料 M&Cプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 231AFBZX00022000
歯科用エッチング材 表面処理材レッド（管理医療機器） 医療機器認証番号 21600BZZ00580000
歯科用エッチング材 表面処理材グリーン（管理医療機器） 医療機器認証番号 21600BZZ00580000
歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンドPZプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 224AFBZX00102000
歯科金属用接着材料 Vプライマー（管理医療機器） 医療機器認証番号 20600BZZ00452000

スーパーボンド®EX



スーパーボンド®EX ユニバーサルセット

■製品構成	
キャタリストV	1本 (0.7mL)
クイックモノマー液	1本 (10mL)
ポリマー粉末 EXクリア	1個 (3g)
ポリマー粉末 EXティースカラー	1個 (3g)
ティースプライマー	1本 (3mL)
M&Cプライマー A液	1本 (2mL)
M&Cプライマー B液	1本 (2mL)
スポンジ (L・S)	1箱
ダッペンスタンド (37℃)	1個
ディスポッペンカップ	20枚
計量スプーン Standard	1本
ディスポ用筆刷 (曲)	1本
ディスポチップ筆刷L (ピンク)	1ケース (10本入り)
ディスポチップ筆刷LL (紫)	1ケース (10本入り)
ディスポチップ混和 (青)	1ケース (10本入り)

単品橋上価格 ¥46,200 相当

■標準価格 ¥29,000

『スーパーボンドEX』の
ポリマー粉末は室温※で
筆積法でも混和法でも
使用可能なのよ！



※周辺の温度環境により異なりますが、25℃以下での使用がおすすめです。



M&Cプライマー™ セット

A液：5mL+B液：5mL 8,800円
(単品：A液/B液 各5mL 各4,500円)

『M&Cプライマー』は
すべての修復物に使える
マルチプライマーだから
金属・セラミックスはもちろん！
ジルコニアやCAD/CAM冠にも
使えて便利だぜ！！

■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2024年4月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(592)9980

スーパーボンド®EXの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はこちら

