

5分でわかる
スーパーボンド
Super-Bond

進化し続けるレジンセメント



お願いします先輩！
助けてください！



マザーレイク
デンタルクリニック
歯科医師 浅井 江利子


いきなり
助けてって
言われてもなあ
一体何が
あったんだよ？

盛山デンタルクリニック
院長 盛山 一則
江利子の歯科大学時代の先輩

なんだあ？
どうした？
浅井

実は…
私が勤務している
歯科医院で…

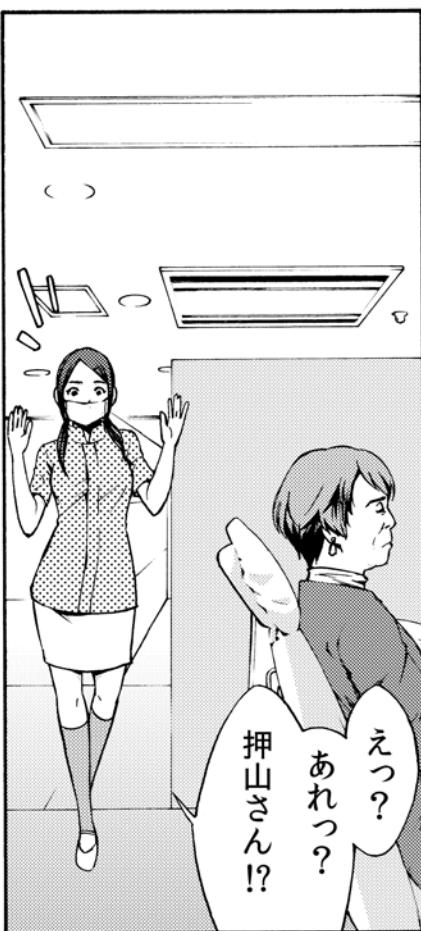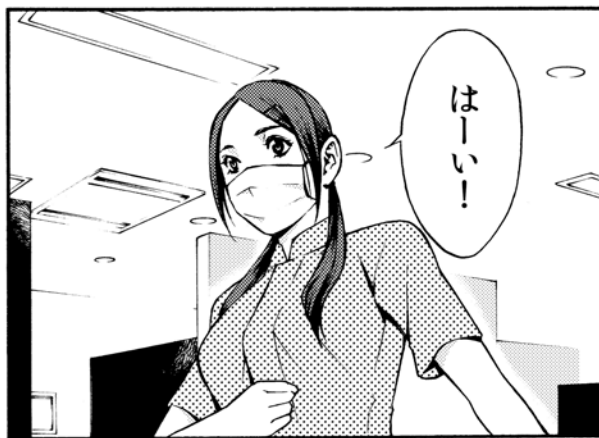

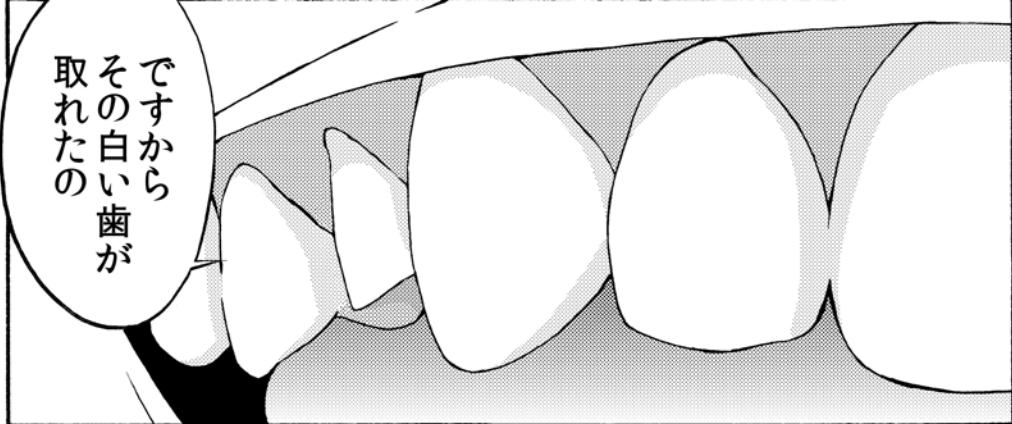




はい…

また
CAD/CAM冠
の脱離か？




俺も
今月で3人目！
患者さんに推奨して
これじゃあ
信用なくしちゃうよ

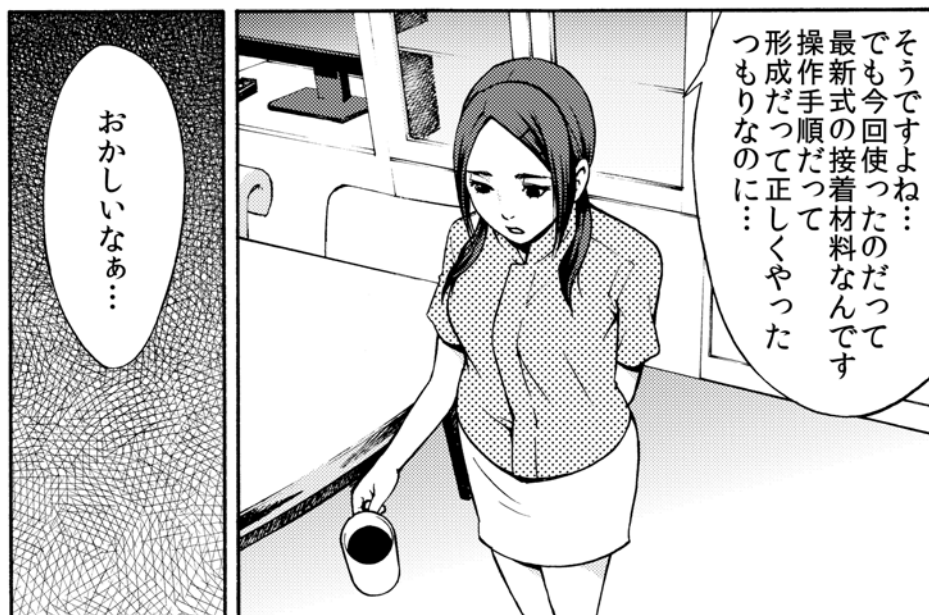


おかしいなあ…

そうですね…
でも今回使ったのだから
最新式の接着材料なんです
操作手順だつて
形成だつて正しくやつた
つもりなのに…



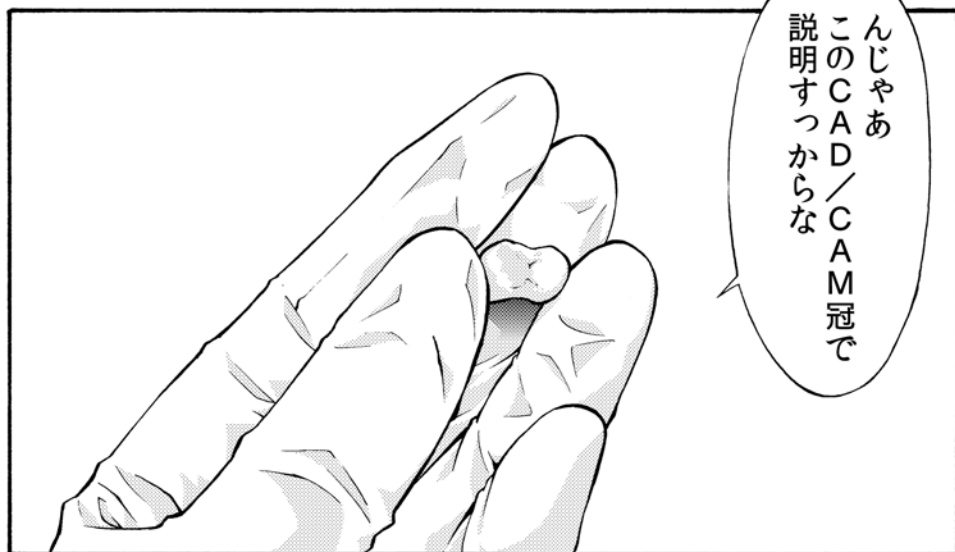

スーパード
じゃないですか…？

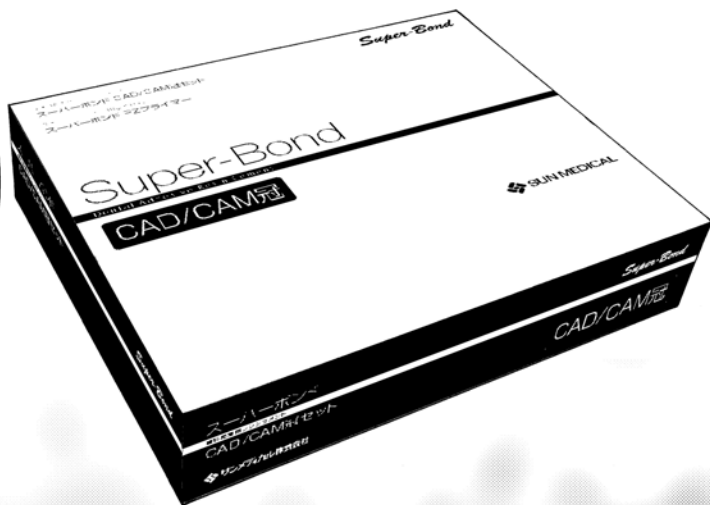




スーパードって
動揺歯固定用ですよ
今回接着するのは
CAD/CAM冠
なんですよ？

ああ
そうだけども？

それにスーパードって
すごい昔からある
材料じゃないですか

新しい技術の
CAD/CAM冠の
接着になんて
対応できませんよ

えん

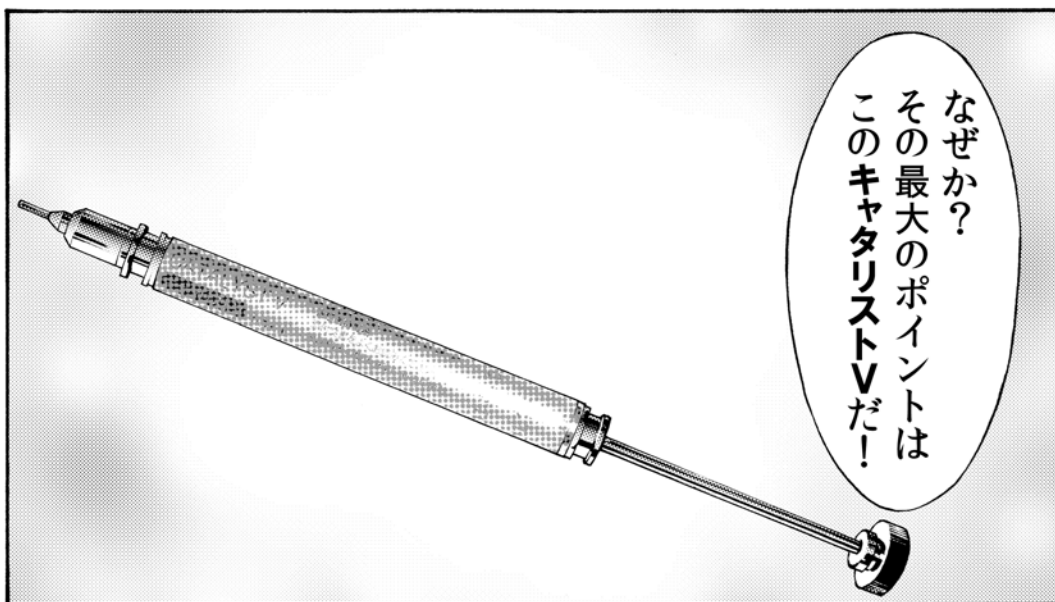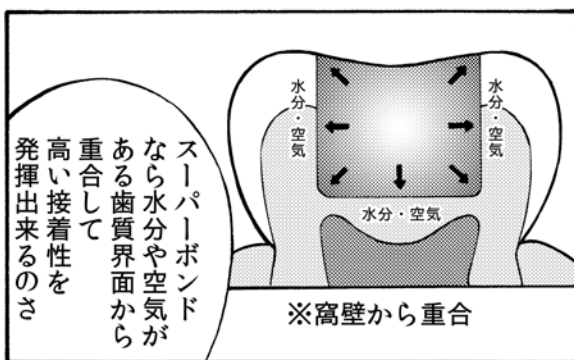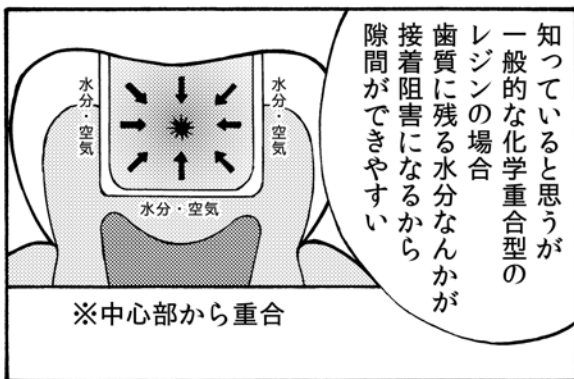



ええっ!?



水と空気に
反応して重合する
TBBという
重合触媒を
採用しているのさ

つまりだ…

スーパーボンドは
補綴物の接着にも
有効ってことだ!



もちろん
しつかりとした
前処理は
必要だぞ!

例えば歯質に
対してはこの
ティースプライマー
エッチング材と
違うのは
水洗いが不要で
操作が簡単だ!



そして…



加えて
貴金属に対しては
この
Vプライマー
で処理

CAD/CAM冠や
ポーセレン・ジルコニア
に対しては

この
スーパード
PZプライマーだな！



でも
でも

スーパードには
ファイラーが含まれて
いないんですよ？
ポーセレンや
CAD/CAM冠の
接着には向いていない
はずですよ！



ファイラーが
含まれていない
しなやかな物性だから
こそ衝撃を吸収して
脱離・破折を軽減
できるのさ



か
そりや逆だろ！
何処で得た知識だ？

根拠あんのか？
ああんっ？



こういう材料ってのはな
自分で使ってみて
その性能を
確認するもんなのさ
よくみてろよ



まず支台歯と
補綴物の内面を
清掃後
前処理をしてー




スーパードボンドは
混和法で操作する



クイック
モノマー液
4滴にー

キヤタリストVを
1滴混ぜて…

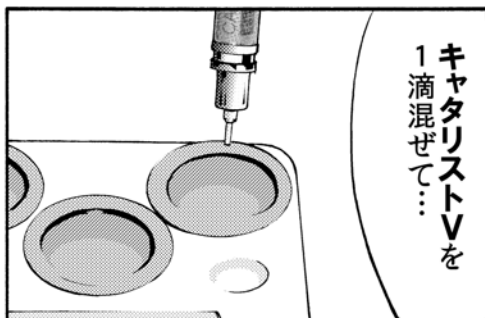


そして
ポリマー粉末は
冷やさなくても
使える
混和ポリマー粉末
を擦り切り一杯
入れて混ぜる！



おっそうそう
混和泥の移送が
難しい場合は

スーパードボンド
マイクロシリンジを
使えば簡単に
移送もできるぜ

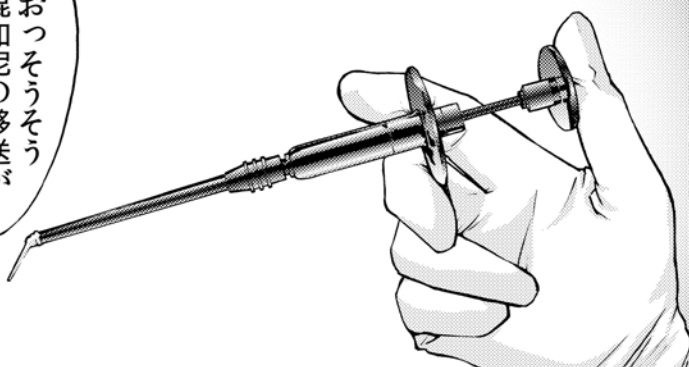



で接着つと…
ほらよ！
CAD/CAM冠
接着できたぜ！



浅井…
新しく生まれる
技術だけが
最新じゃない…


技術を進歩させた
ことだって
最新なんだ





こつ…
こんなに簡単に
できちゃうの
……？




あとはそうだな
余剰セメントの
除去には
ウォッシュアップ
セットの方が便利だぜ

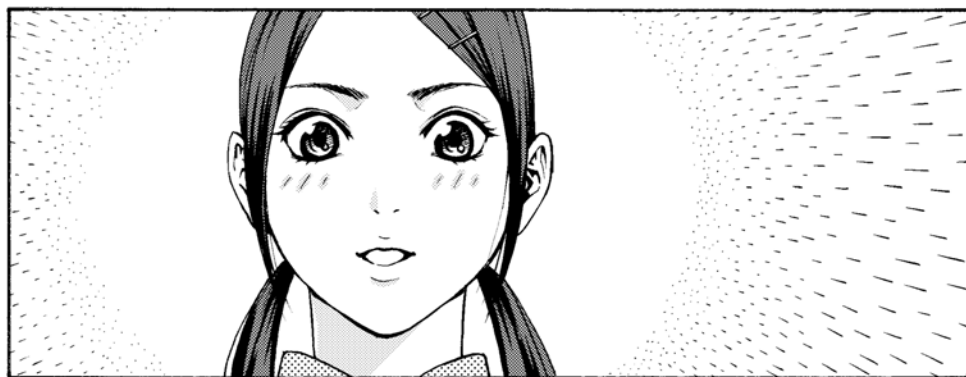

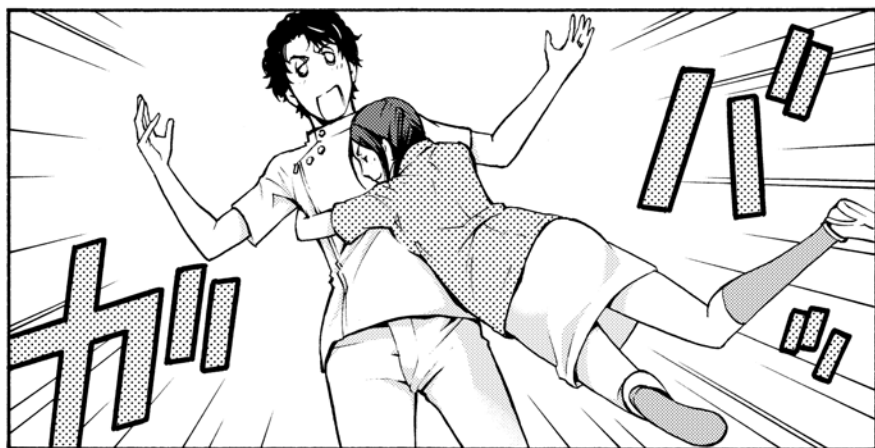

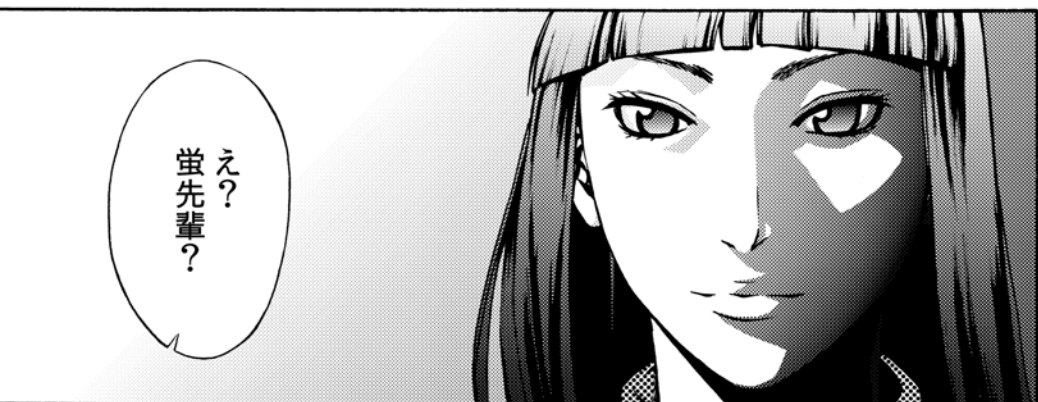

※この物語はフィクションであり、登場する人物・歯科医院名は架空のものです。

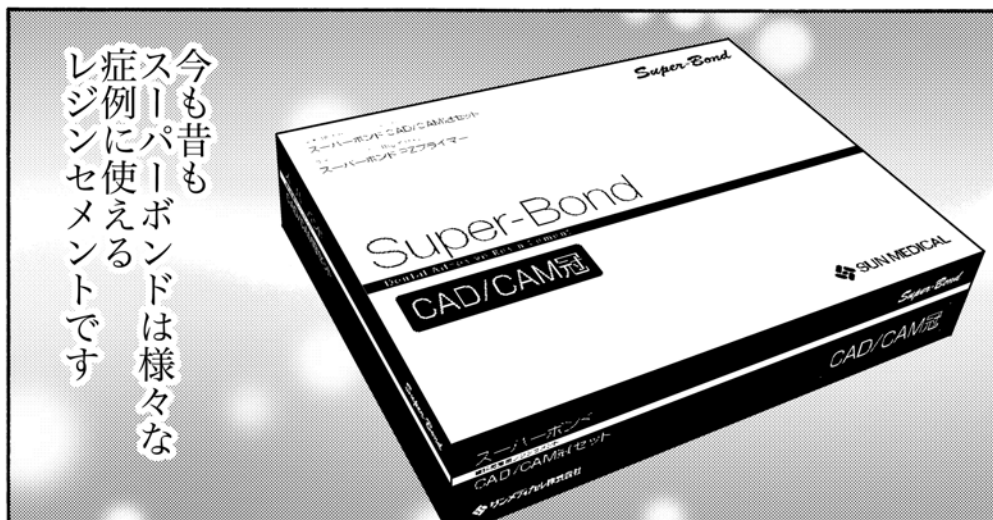


今も昔も
スーパーボンドは様々な
症例に使える
レジンセメントです

CAD/CAM冠の装着 操作ステップ



混和法

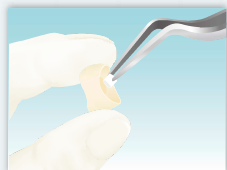


CAD/CAM冠の内面に
スーパーボンドPZプライマー
を塗布・乾燥




支台歯にティースプライマー
を塗布・乾燥

歯面処理材	ティースプライマー
エナメル質・象牙質	20秒

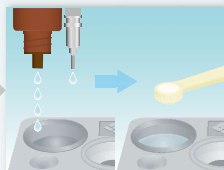

液材・ポリマー粉末の採取
例えば

クイックモノマー液	4滴
キャタリストV	1滴
混和ティースカラー	1.0カップ

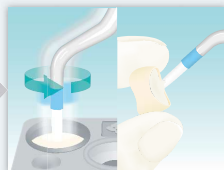

混和・混和泥の塗布



CAD/CAM冠の圧接・保持



余剰セメントの除去



加圧・硬化待ち

硬化待ち時間

操作ステップは動画でも
ご覧頂けます。



キーポイント

- ①活性化液(クイックモノマー液とキャタリストVを混合した液)にポリマー粉末を投入後は手早く混和してください。
- ②混和泥がサラサラの状態(糸引き前)の間に手早くCAD/CAM冠を圧接してください。
- ③CAD/CAM冠が浮き上がらないように、しっかりと保持してください。

『スーパーボンド無料出張説明会』 絶賛受付中！



説明会では、スーパーボンドの実習を交え、正しい使用方法と、便利な応用例をご紹介します。先生方の勉強会に弊社よりご訪問させていただきますので、お電話またはホームページからお問い合わせください。

フリーダイヤル

0120-418-303 (FAX共通)

電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30

※10名様以上でお申込みください。

ホームページ

出張製品説明会のお申し込みページ

サンメディカルホーム > セミナー・イベント > 出張製品説明会 > メールフォーム
<http://www.sunmedical.co.jp/events/index.html>



携帯電話・スマート
フォンからもお申し
込みいただけます。



この物語はフィクションです。登場する人物・医療機関等は架空のものです。
また、治療方針を推奨するものではありません。
材料の使用については、診断に基づいて適切にご使用ください。

CAD/CAM冠装着に便利なセットと単品

セット

スーパーボンド CAD/CAM冠セット



標準価格 24,800円



CAD/CAM冠の前処理に必要な「スーパーボンド PZプライマー」が入ったセットです。

高い接着強さとしなやかな物性で、脱離や破折を軽減できます。

クイックモノマー液 1本(10mL)
 キャタリストV 1本(0.7mL)
 ポリマー粉末未混和ティースカラー 1個(3g)
 ティースプライマー 1本(3mL)
 スーパーボンド PZプライマー A液 1本(1mL)
 スーパーボンド PZプライマー B液 1本(1mL)
 スポンジ(L・S) 1箱
 ダッペンスタンド(3穴) 1個
 ディスボッドスタンナップ 20枚
 計量スプーン Standard 1本
 ディスポ用筆柄(曲) 1本
 ディスポ用筆柄(直) 2ケース(各10本入り)

スーパーボンドは

CAD/CAM冠装着におすすめ！

高い
接着性能

しなやかな物性が
衝撃を吸収

水分や酸素と
反応

重合開始剤



キャタリストV
0.7mL 15,870円

液材



クイックモノマー液
10mL 7,450円

ポリマー粉末



混和ティースカラー
3g 2,800円

混和法専用
ポリマー粉末の特長

- ダッペンディッシュ
(陶器)の冷却不要。
- 増温で使用可能。

前処理材

歯 面
(エナメル質・象牙質兼用)



ティースプライマー
3mL 3,450円

セラミックス・レジン面
(CAD/CAM冠・ポーセレン・ジルコニアなど)



スーパーボンド PZプライマー
セット 7,600円
(単品 A液 5mL/B液 5mL 各3,900円)

その他 ※セットには含まれていない単品

スーパーボンド 注入器具

簡単に多量の混和泥を
ピンポイントに移送！



スーパーボンドマイクロシリンジ
9,800円
(単品：シリンジトップ 60本 2,500円)

水溶性分材材

余剰セメント除去を
簡単に！



ウォッシュャブル セップ
10mL 1,800円

歯科接着用レジンセメント スーパーボンド
歯面処理材 ティースプライマー
歯科金属用接着材料 V-プライマー

(管理医療機器) 医療機器認証番号 221AAB7X00115000
 (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFB7X00100000
 (管理医療機器) 医療機器認証番号 20600R7Z00457000

歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンド PZプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 224AFB7X00102000
 歯科用注入器具 スーパーボンド マイクロシリンジ (一般医療機器) 医療機器届出番号 25B2X00005000003
 歯科用分材材 ウォッシュャブル セップ (一般医療機器) 医療機器届出番号 25B2X00005000005

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■印刷のため色調は実物と異なります。

■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■標準価格・表示記載は2018年2月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社 〒524-0044 滋賀県守山市吉高町57-2 ☎ 077(582)9980

スーパーボンドの操作ステップ動画がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ→



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30