

For example

「ウォッシュブル セップ®」の使用例

Washable
SEP

歯科用分離材
ウォッシュブル セップ®

SUN MEDICAL

修復物接着時の
余剰セメントの分離に



修復物の外面に「ウォッシュブル セップ」を塗布



接着性レジンセメントでセットし、
余剰セメントを除去



「ウォッシュブル セップ」を水洗で
除去

その他の応用例

メタルストリップスへの塗布に

「ボンドフィルSB プラス」使用時など、
メタルストリップスとの分離



修復物の保護に

余剰セメント除去時にインスツルメント
で修復物に傷をつけない場合の
マスキング



Washable SEP

「ウォッシュブル セップ®」の塗布にオススメ!

ディスポチップ 数量 各10本 標準価格 各¥1,000



筆積S (緑) 筆積L (ピンク) 筆積LL (紫)



ディスポ用筆柄 (曲) 標準価格 ¥950



歯科用分離材
ウォッシュブル セップ®
容量 10mL
標準価格 ¥2,000

口腔内で使えて、
洗い流せる分離材

関連製品



歯科接着用レジンセメント
スーパーボンド®EX ユニバーサルセット
標準価格 ¥29,000



歯科充填用アクリル系レジン
ボンドフィルSB® プラス セット
標準価格 ¥27,000



歯科用シーリング・コーティング材
ハイブリッドコート™II セット
標準価格 ¥18,700



歯科用シーリング・コーティング材
BioコートCa® セット
標準価格 ¥13,200



歯科裏層用高分子系材料
バルクベース®ハードII セット
標準価格 ¥19,500

歯科用分離材 ウォッシュブルセップ (一般医療機器) 医療機器届出番号 2582X00005000005 歯科接着用レジンセメント スーパーボンドEX (管理医療機器) 医療機器認証番号 303AKBZX00050000
歯科充填用アクリル系レジン ボンドフィルSB プラス (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AFBZX00035000 歯科用シーリング・コーティング材 ハイブリッドコートII (管理医療機器) 医療機器認証番号 221AFBZX00106000
歯科用シーリング・コーティング材 BioコートCa (管理医療機器) 医療機器認証番号 230AKBZX00059000 歯科裏層用高分子系材料 バルクベースハードII (管理医療機器) 医療機器認証番号 304AKBZX00066000

■製造販売

サンメディカル株式会社 本社/〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

「ウォッシュブル セップ®」の情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索



スマートフォン
からのアクセス
はこちら →

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30

■発売 株式会社モリタ 大阪本社/〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 ☎06-6380-2525
東京本社/〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎03-3834-6161
お客様相談センター フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者様専用)

How to use

「ウォッシュャブルセップ®」の用途と使用方法

Water Soluble Release Agent

多目的に使える
水溶性分離材
「ウォッシュャブルセップ®」

歯科用レジン系材料の発展にともない、臨床現場において様々な症例でレジン系材料が使用されるようになりました。それと同時に仮封時など、レジン同士を接着させたくないという場面も増えてきています。

「ウォッシュャブルセップ」は口腔内で使用できる水溶性分離材で、レジンの分離に適した材料です。

ワセリンなどの油性分離材とは異なり、水洗で容易に除去できます。

「ウォッシュャブルセップ」除去後は、レジンセメントの接着に影響を及ぼさないで、様々な用途にご使用いただけます。



レジン系接着材に 修復物装着時の余剰セメントの分離に



歯科接着用レジンセメントスーパーボンド®EX 余剰セメントが付着しそうな隣に歯に塗布し、乾燥する。 修復物外面、マージン上部に分離材を塗布し、乾燥する。 「スーパーボンドEX」により修復物を装着する。 硬化後、余剰セメント除去器を用いて余剰セメントを除去する。 残った「ウォッシュャブルセップ」を水洗除去する。

レジンコーティング材・レジン系裏層材に レジンコーティング面やレジン系裏層材充填後の仮封時の分離に



歯科用シーリング・コーティング材ハイブリッドコート™II レジンコーティングやレジン系裏層材使用後の窩洞。 「ウォッシュャブルセップ」を塗布し、乾燥する。 レジン系仮封材で仮封する。 修復物をセットする前に仮封材を除去する。 窩洞に残った「ウォッシュャブルセップ」を水洗除去する。

「ウォッシュャブルセップ®」の優れた特長

point 01
口腔内使用可能

全て口腔内で使用可能な原材料で製造しています。

point 02
高い分離効果

塗布と乾燥のみで容易に被膜を形成でき、高い分離効果を発揮します。

point 03
水溶性

成分が水溶性のため、水洗で除去することで接着阻害因子となりません。

One Point Advice
ワンポイントアドバイス

● 「ウォッシュャブルセップ®」の分離効果

「ウォッシュャブルセップ」の分離効果は被膜の色調で確認できます。適用部位や用途に応じて重ね塗りし、被膜を厚くすることで、より高い分離効果が得られます。



● 「ウォッシュャブルセップ®」の塗布について

「ウォッシュャブルセップ」を塗布する際は、筆を使用されるとムラなく簡単に塗布できます。



● 「ウォッシュャブルセップ®」の除去について

水洗だけで除去しにくい場合は、水に浸した綿球などでこすりながら除去してください。

