

包装・価格

歯科用象牙質接着材

AQボンド™SP



5.5mL
セット

AQボンド™SP 5.5mLセット
標準価格 ¥16,300

ボンド…………… 5.5mL
キャタスポンジ…………… 175粒
V型ダッペン…………… 5枚

単品



ボンド
5.5mL ¥15,300



キャタスポンジ
175粒 ¥3,000



V型ダッペン
30枚 ¥1,100
※V型ダッペンにボンド採取後は、3分以内を目安に
ご使用ください。



3mL
セット

AQボンド™SP 3mLセット
標準価格 ¥10,800

ボンド…………… 3mL
キャタスポンジ…………… 100粒
V型ダッペン…………… 5枚

関連製品

ミディアムフロー



ペースト抽出後、垂直に
たて60秒後に撮影
(室温23℃での試験)



歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル® Flo
ミディアムフロー
標準価格 各色 ¥4,200

シェード 〈9色〉A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN、OPAQUE、U-OPAQUE

商品構成
シリンジ…………… 1.5mL (2.6g)
20Gニードル…………… 2本
23Gニードル…………… 2本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
23Gニードルロング…………… 1本

ローフロー



ペースト抽出後、垂直に
たて60秒後に撮影
(室温23℃での試験)



歯科充填用コンポジットレジン
メタフィル® Flo
ローフロー
標準価格 各色 ¥4,200

シェード 〈7色〉A1、A2、A3、A3.5、B2、CV、D-BROWN

商品構成
シリンジ…………… 1.5mL (2.6g)
20Gニードル…………… 5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

歯科用象牙質接着材 AQボンドSP (管理医療機器) 医療機器認証番号 219AABZX00122000 歯科充填用コンポジットレジン メタフィル Flo (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00103000

■「メタフィル」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「AQボンド」はサンメディカル株式会社の商標です。
■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年11月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **サンメディカル株式会社**

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL 077-582-9980
<https://www.sunmedical.co.jp>


販売元 **株式会社ニッシン**

〒601-8469 京都市南区唐橋平町8
<https://www.nissin-dental.jp>

歯科用象牙質接着材

AQボンド™SP

AQボンド™シリーズ史上 最強・最短を実現!

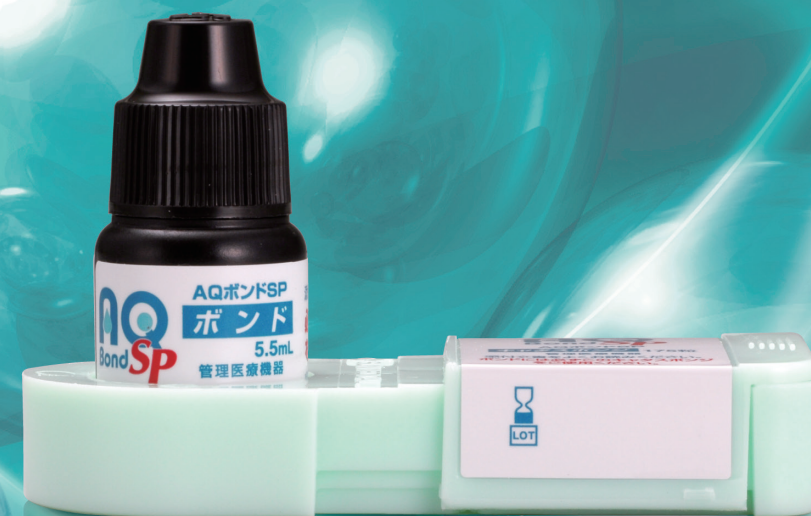

SUN MEDICAL


AQボンド™シリーズ史上、最強・最短を実現!

AQボンド™(2000年4月発売)、AQボンド™ プラス(2003年4月発売)、AQボンド™SP(2007年11月発売)




う蝕影響象牙質への
薄膜接着を継承

う蝕影響象牙質における樹脂含浸層の形成

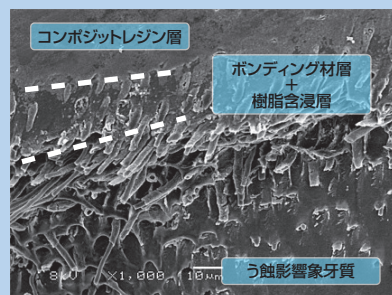


接着促進成分を含む専用の「キャタスポンジ」を使用することにより、良質の樹脂含浸象牙質を形成し、「薄いボンディング材層」で優れた接着性能を示します。

・・・接着促進成分を含む「キャタスポンジ」・・・

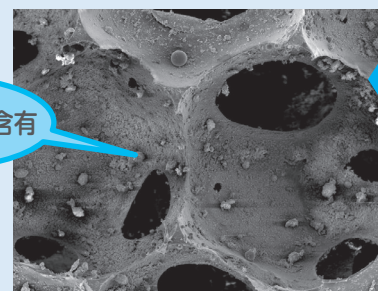

ボンド塗布には必ず専用の「キャタスポンジ」をご使用ください。他のスポンジを使用すると性能は極端に悪くなります。
脱灰を受けて水分が多く含まれたう蝕影響象牙質に対して、「強い浸透性」を発揮するサラサラした液体と「キャタスポンジ」に含浸させた接着促進成分が十分に浸透します。

※1
歯質接着性能を向上

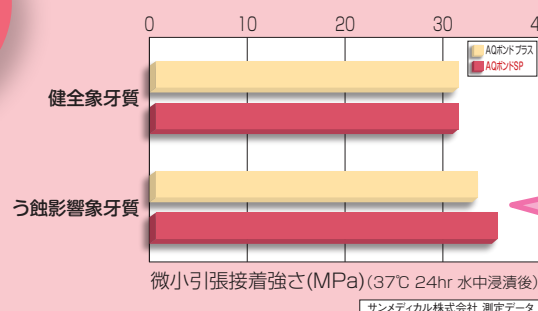


接着性能を
向上!

「AQボンド プラス」の優れた接着性能を継承しながら、う蝕影響象牙質では接着性能の向上を実現しました。


目視確認できる均一な
成膜性を実現



塗布前

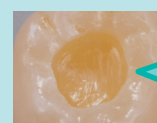

塗布後

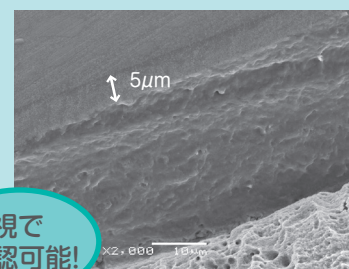

目視で
確認可能!

均一な成膜を形成

塗布面は光沢により目視で確認できます。また、約5ミクロンの均一で薄い被膜を形成します。

※2
操作時間の
短縮を実現

各種光照射器に対応!

AQボンド プラス

光照射器	照射時間
ハロゲン系	5秒
キセノン系	3秒
LED系	10秒

AQボンドSP


光照射器	照射時間
ハロゲン系	3秒
キセノン系	3秒
高出力LED系	3秒

光照射時間
を短縮!


(AQボンド™ プラス 操作時間: 最短33秒)

操作時間は、わずか **18~33 秒!**


操作時間を
短縮!

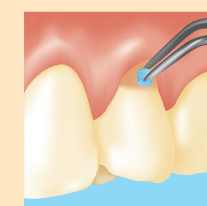

ボンド塗布
10~20秒

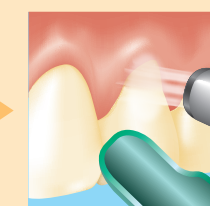

強いエアブロー
5~10秒

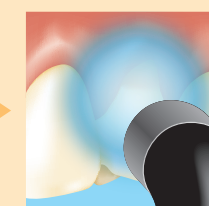

光照射
3秒

「AQボンド™SP」におすすめの
フロアブルコンポジットレジン!

◆ 臨床例 ◆

歯頸部への充填



臨床症状を有する歯頸部楔状欠損。MIに基づく窩洞形成を行う。



ボンディング処理。
う蝕影響象牙質にも有効な「キャタスポンジ」を用いて10秒間ボンド塗布を行う。



「メタフィル Flo アルファA2」充填。
フロアブルレジンを用いることにより重合収縮が緩衝され予後の安定性につながる。

※「メタフィル Flo アルファ」は販売を終了しました。後継品として「メタフィル Flo ローフロー」を販売しております。




「AQボンドSP」を用いることにより臨床症状も改善。知覚過敏症例には特に有効である。術後。

選べる2つの流動性

メタフィル® Flo ミディアムフロー

高
流動性

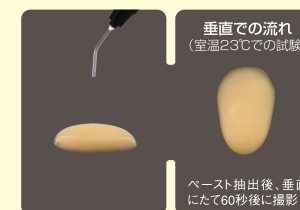

メタフィル® Flo ローフロー

低
流動性

