

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート ONE

健保適用

SUN MEDICAL

MS Coat ONE

Desensitizer for
Hypersensitive Teeth

痛みを抑える、
やさしいワンボトル



患者さんに
「やさしい」

知覚過敏の痛みを抑え、
高い効果を持続します。



歯に
「やさしい」

実績のあるMSコートの
品質を継承しています。



操作が
「やさしい」

1液性になり、操作が
より簡単になりました。




待望の1液性「MSコート ONE」登場!

「MSコート」の高い知覚過敏抑制効果はそのままに操作性を追求しました。

作用メカニズム


ナノサイズMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、保護被膜を形成して象牙細管を**緊密に封鎖**します。

MSコート ONE 適用前

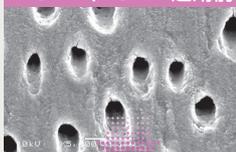


象牙細管が開いた象牙質表面


MSコート ONE 適用後

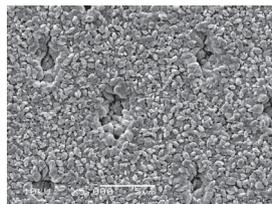

シュウ酸カルシウム結晶を含んだMSポリマー被膜が象牙細管を封鎖している。

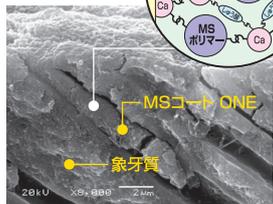


MSポリマータグが象牙細管を緊密に封鎖している。

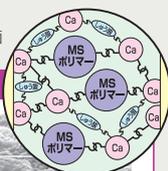

即効性と持続性を継承

MSコート ONEは、**適用直後に99.4%、3年を経過しても77.4%の有効性**を示しました。

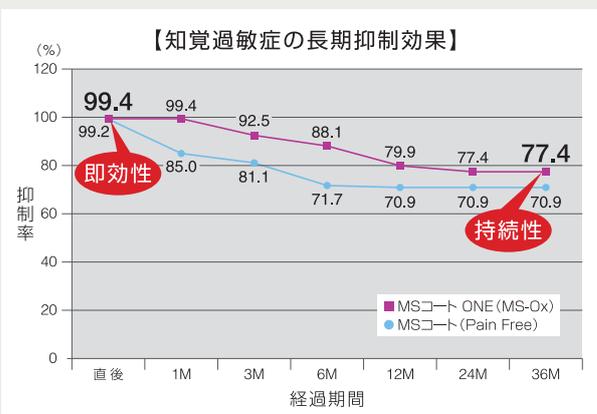

歯頸部知覚過敏症を有する罹患歯に対し、MSコート ONEをこすりながら塗布し、エアードライにて過敏状態を評価した。〔()内は下記文献中の名称〕
S.Suzuki: Clinical Performance of Desensitizers for Dentin Hypersensitivity: 2006 IADR General Session #1590, Brisbane, June 28-July 1, 2006

充実した付属品

充実した付属品で、**確実な治療**がおこなえます。

フェルトチップ・フェルトホルダー



歯肉縁下や歯間部にアクセスしやすい




先端を広げると広範囲にこすり塗りできる

ホワイトニング時の知覚過敏抑制効果


ホワイトニング前の知覚過敏予防、ホワイトニング後の知覚過敏抑制にも高い効果が期待できます。

MSコート ONE 適用前

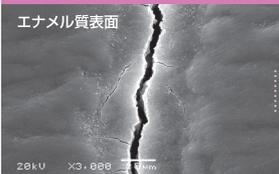

ホワイトニング後のマイクロクラックは刺激を伝達しやすくなる。

MSコート ONE 適用後

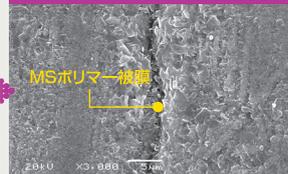

MSポリマー被膜でマイクロクラックを封鎖し、刺激の伝達を抑制する。

【操作手順】



包装・価格

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート ONE (管理医療機器)

医療機器認証番号 221AFBZX00007000

■ その他の単品

- フェルトホルダー ¥1,350
- フェルトチップ (100本入) ¥2,200
- 綿球 (圧縮綿球) ¥650

※プラスチックダブペンはスーパーボンド関連製品と共用になっています。

ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。



MSコート ONE セット 標準価格 ¥10,800

- MSコート ONE 5mL
- フェルトホルダー 1本
- フェルトチップ 100本
- プラスチックダブペン 20枚



MSコート ONE リフィルセット 標準価格 ¥9,050

- MSコート ONE 5mL
- フェルトチップ 100本



MSコート ONE (単品) 標準価格 ¥8,400

- MSコート ONE 5mL

■標準価格・表示記載は2023年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30
ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>