

## 包装・価格

### 歯科汎用アクリル系レジン プロビスタ®



#### 液 材

(スポイト(小)/(大)、ワンタッチキャップ付)

100mL ¥3,000  
250mL ¥6,400



#### スーパーquick液材

(スポイト(小)/(大)、ワンタッチキャップ付)

100mL ¥3,000  
250mL ¥6,400



#### 粉 材

(粉材計量器、ノズル式キャップ付)

50g 各色 ¥3,000  
250g 各色 ¥9,700

色調：A1、A2、A3、A3.5、  
インサイザル、ブリーチングホワイト、  
ピンク、ファイバーピンク

## 単 品



#### 粉 材

(ノズル式キャップ付)

25g 各色 ¥2,450

色調：オパールアイボリー、オパールピンク



ディスポチップ  
筆積3L(オレンジ)  
10本 ¥1,150



ディスポ用筆柄(直)  
1本 ¥950



ディスポ用筆柄(曲)  
1本 ¥950



スポイト(小)  
1本 ¥110



スポイト(大)  
1本 ¥110



スパチュラ  
1本 ¥350



ラバーカップ  
1袋(3個入) ¥1,100



粉材計量器  
1個 ¥350

## 関 連 製 品

金属表面の  
接着に使用



歯科汎用アクリル系レジン  
メタファスト™  
ボンディングライナー  
(竹筆1本付)  
7mL 標準価格 ¥5,300

非貴金属専用のプライマーです。  
アルミナサンドブラスト後のチタン合金やコバルトクロム合  
金等が高い接着力を発揮します。



レジン分離材  
プライムセップ™  
プライムセップ 1本(5mL)  
プライムセップ希釈液 1本(7mL)  
標準価格 ¥3,000

石膏表面などに使用する、レジン系分離材です。  
石膏模型上で作製する暫間被覆冠などの分離に適してい  
ます。



歯科用分離材  
ウォッシュブル セップ  
10mL 標準価格 ¥2,000

口腔内で使用できる水溶性分離材です。  
直接法で作製する暫間被覆冠などの分離に使用できます。

歯科汎用アクリル系レジン プロビスタ (特許医薬品) 医療機器認証番号 220AFBZX00245000  
歯科汎用アクリル系レジン メタファスト (特許医薬品) 医療機器認証番号 305AFBZX00250000

■「プロビスタ」「Provista」「ウォッシュブルセップ」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「メタファスト」「プライムセップ」はサンメディカル株式会社の商標です。  
■ご使用の際は、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年11月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社 本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30  
ホームページ http://www.sunmedical.co.jp

EPV-01

歯科汎用アクリル系レジン  
プロビスタ®

SUN MEDICAL

# PROVISTA

プロビスタ®

## 速い! 硬い! きれい!

## 常温重合レジン「プロビスタ®」



粉材は共通で  
使用できます!








# 「スーパークイック液材」登場で 「プロビスタ®」がさらに使いやすくなりました!

「プロビスタ」は「テンポラリークラウン」から長期にわたる「プロビジョナルレストレーション」まで、幅広く使用できるように設計された歯科用常温重合レジンです。

「スーパークイック液材」は従来の「プロビスタ」の性能はそのままに、  
粉材共通で硬化時間を短縮できるので大変便利です。

## 選べる2つの操作時間 (イメージ)

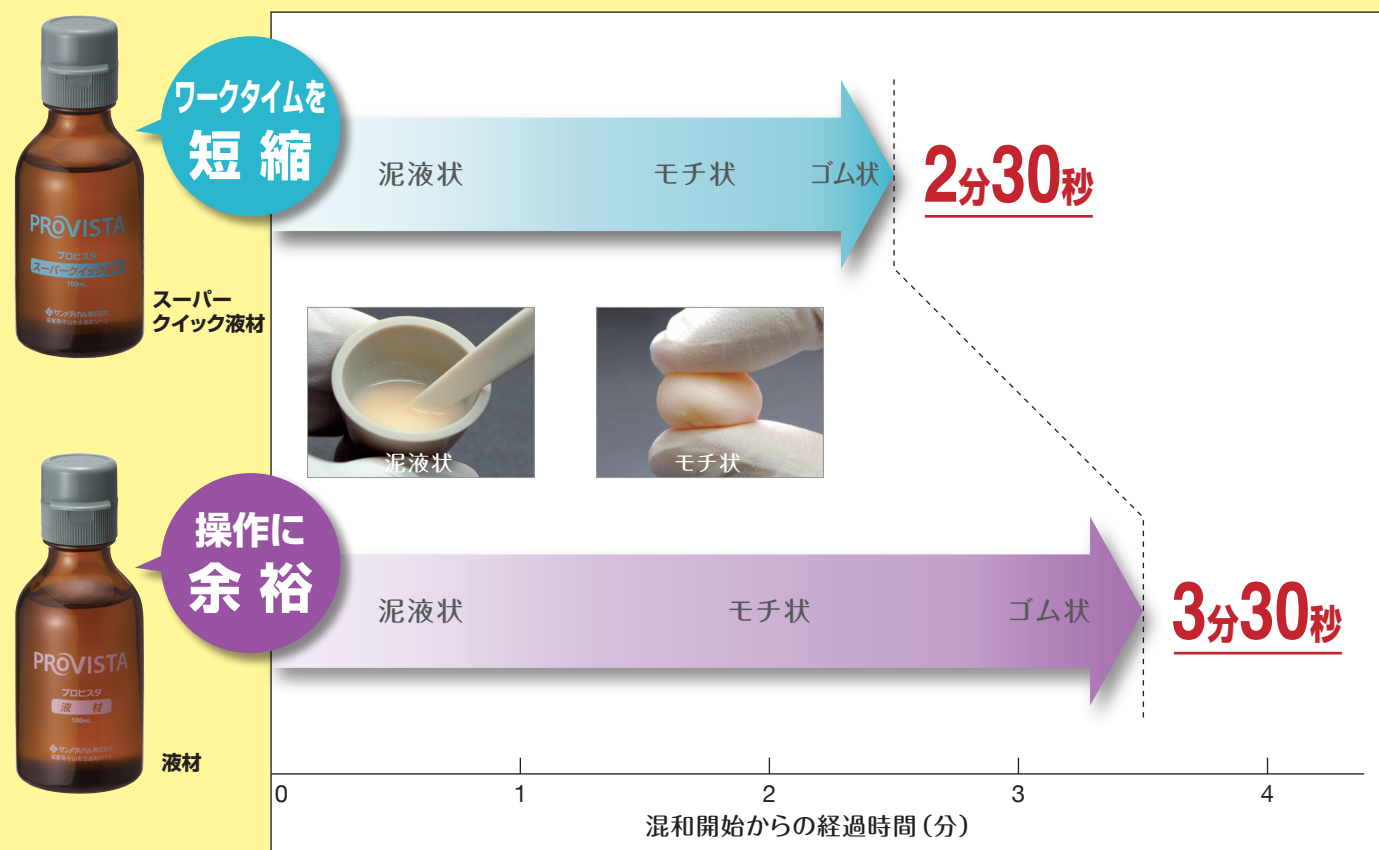

【測定条件】混和法を想定：粉/液 = 2g/1mL 27℃、相対湿度50%環境下で操作した場合

## 粉材は全色共通で使用可能!

「プロビスタ」のすべての「粉材」は「液材」にも「スーパークイック液材」にも使用可能です。2種類の液材による色ずれもありません。

粉材  
共通



## 優れた操作性

ナノテクノロジーを取り入れた「反応性有機質複合フィラー」に、ポリマー粒子と表面処理技術を組み合わせることで、優れた操作性を実現しました。

### 粉液親和性 (シリコンコア法)

粉材と液材の馴染みが非常に良く、流動性に優れているため、気泡混入、色ムラが低減します。



### 付形性 (筆積法)

チクソトロピー性に優れているため、垂れが少なく形態付与が容易で、思い通りの築盛が可能です。



### 研磨性・滑沢性

従来品にはなかった切削感を実現し、艶だしも容易にできます。



当社従来品


プロビスタ



## 豊富なカラーバリエーションと審美性

歯冠色6色、歯肉色2色、さらに2色のオパーク色採用で幅広い症例への適用と、審美修復が可能です。

### カラーバリエーション

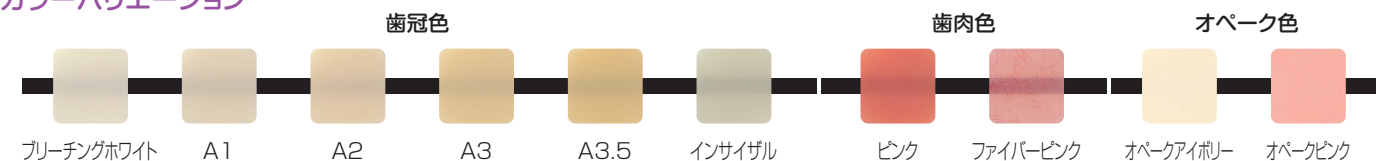

※印刷のため色調は実物と異なります。

### 少ない色ムラ・気泡

筆積法、シリコンコア法 (混和注入法) の双方において、気泡混入、色ムラの低減を実現しました。



筆積法

シリコンコア法

### 耐変色性

黄変や白濁などの変色が少ないので、長期間の使用においても審美性が保たれます。



重合直後 1ヶ月経過後 37℃水中浸漬試験

色調再現の世界が広がる

## オパーク色を採用!


オパークアイボリー

オパークピンク



オパーク未使用

オパーク使用

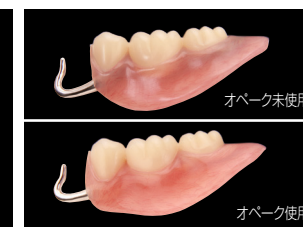

オパーク未使用

オパーク使用


金属色の遮蔽や写り込みの防止が必要な症例は、オパーク色を使用することで、高い色調再現が得られます。



## 機械的物性 (曲げ強さ)

アクリルレジンの特性である“しなやかさ”を損なうことなく“硬くて強い”物性を実現しました。

### 3点曲げ試験

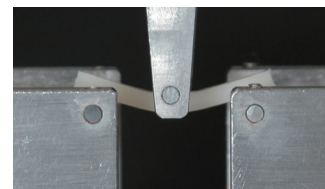



### 曲げ強さ

|            |       |
|------------|-------|
| スーパークイック液材 | 90MPa |
| 液材         | 86MPa |
| 当社従来品      | 77MPa |



## 耐久性 (耐摩耗性)

表面硬度を高めることで、耐摩耗性が向上しました。

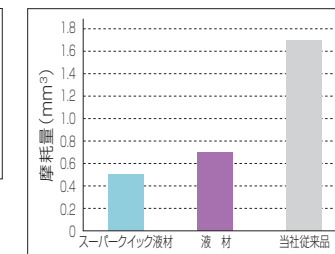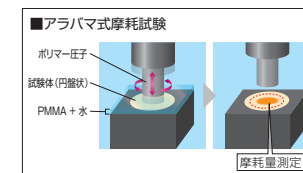




# 「プロビスタ®」を用いた様々な症例

2種類の液材がラインナップされている「プロビスタ」は様々な用途でご活用いただけます。

## TeC作製&ウォッシュ

シャープな硬化でTeC作製の時間を短縮できます。  
機械的物性に優れているためマージン部調整時のチッピングを防ぐ事ができます。

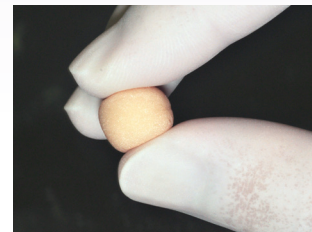

混和法にてモチ状にしたレジン。



口腔内支台歯へ圧接を繰り返す。




レジン硬化後、形態修正。



TeC内面に筆積みにてA3を流し込む。



再度、口腔内支台歯へ圧接(ウォッシュ)。

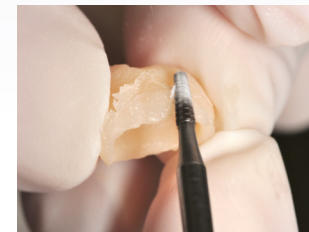


マージン部調整・研磨・完成。

## リカントゥアリング

滑沢性に優れているため、歯肉の状態を整えるカントゥア(豊隆)の調整に適しています。




アンダーカントゥアが見受けられるプロビジョナルレストレーション。

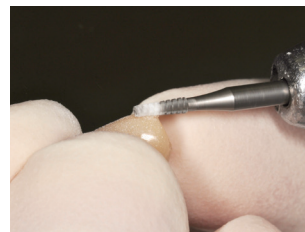

マージン部付近の新鮮面を出す。



マージン部付近にA3.5を築盛。

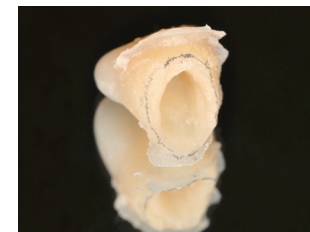

マージン部及び遊離歯肉端にあたる部位を鉛筆で印記。



形態修正・研磨。



完成。

## デンチャー修理

床用レジンとの馴染みに優れているため綺麗に仕上がります。  
歯肉色にもフィラーを配合しているため、切削・研磨が容易です。



破折したデンチャー。



デンチャーを元の位置に戻しスティッキーワックスなどで固定。



内面に石膏を流し、コアを作製。



新鮮面を出し、機械的維持を付与。



筆積みにてファイバーピンクを築盛。



形態修正・研磨・完成。

## デンチャーバイトアップ

機械的物性と耐久性に優れているため、バイトアップに適しています。



摩耗したデンチャー。



新鮮面を出し、筆積みにてA3を築盛。



口腔内に戻し、ゆっくりと咬合させる。



レジン硬化後、咬合のチェック。



形態修正・咬合調整。



研磨・完成。