

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート ONE

健 保 適 用

 SUN MEDICAL

MS Coat ONE

Desensitizer for
Hypersensitive Teeth

痛みを抑える、
やさしいワンボトル



患者さんに
「やさしい」

知覚過敏の痛みを抑え、
高い効果を持続します。



歯に
「やさしい」

実績のあるMSコートの
品質を継承しています。



操作が
「やさしい」

1液性になり、操作が
より簡単になりました。




待望の1液性「MSコート ONE」登場!

「MSコート」の高い知覚過敏抑制効果はそのままに操作性を追求しました。

作用メカニズム


ナノサイズMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、保護被膜を形成して象牙細管を**緊密に封鎖**します。

MSコート ONE 適用前

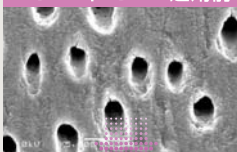


象牙細管が開いた象牙質表面


MSコート ONE 適用後

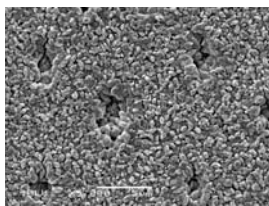

シュウ酸カルシウム結晶を含んだMSポリマー被膜が象牙細管を封鎖している。

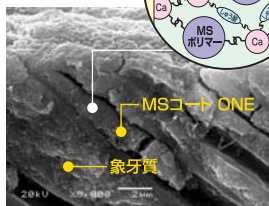


MSポリマーが象牙細管を緊密に封鎖している。

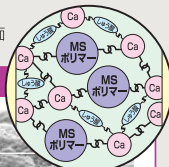

即効性と持続性を継承

MSコート ONEは、**適用直後**に99.4%、**3年を経過しても**77.4%の有効性を示しました。

【知覚過敏症の長期抑制効果】

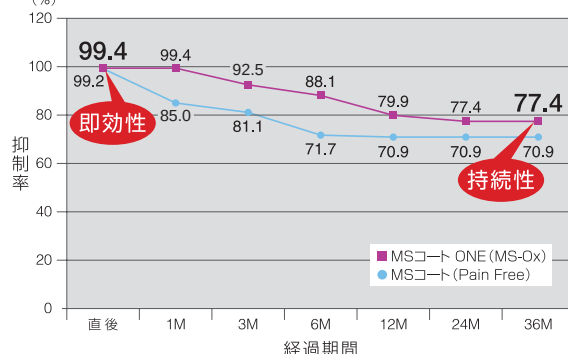

歯頸部知覚過敏症を有する罹患歯に対し、MSコート ONEをこすりながら塗布し、エアードライにて過敏状態を評価した。(()内は下記文献中の名称)

S.Suzuki: Clinical Performance of Desensitizers for Dentin Hypersensitivity: 2006 IADR General Session #1590, Brisbane, June 28-July 1, 2006

充実した付属品

充実した付属品で、**確実な治療**がおこなえます。

フェルトチップ・フェルトホルダー




歯肉線下や歯間部にアクセスしやすい

先端を広げると広範囲にこすり塗りできる

ホワイトニング時の知覚過敏抑制効果


ホワイトニング前の知覚過敏予防、**ホワイトニング後**の知覚過敏抑制にも高い効果が期待できます。

MSコート ONE 適用前

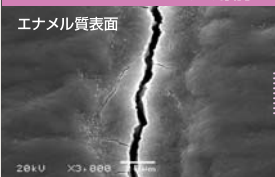

ホワイトニング後のマイクロクラックは刺激を伝達しやすい。

MSコート ONE 適用後

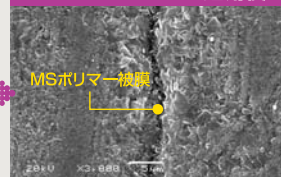

MSポリマー被膜でマイクロクラックを封鎖し、刺激の伝達を抑制する。

【操作手順】



包装・価格

歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート ONE (管理医療機器)

医療機器認証番号 221AFBZX00007000

■その他の単品

- ・フェルトホルダー ¥1,200
- ・フェルトチップ (100本入) ¥2,000
- ・綿球 (圧縮綿球) ¥600

※プラスチックダッペンはスーパーボンド関連製品と共用になっています。

ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。



MSコート ONE セット
標準価格 ¥9,800

MSコート ONE 5mL
フェルトホルダー 1本
フェルトチップ 100本
プラスチックダッペン 20枚



MSコート ONE リフィルセット
標準価格 ¥8,200

MSコート ONE 5mL
フェルトチップ 100本



MSコート ONE (単品)
標準価格 ¥7,600

MSコート ONE 5mL

■標準価格・表示記載は2009年6月22日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980
東京オフィス / 〒113-0034 東京都文京区湯島3-13-8 ☎03(3835)9089

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金 (祝日を除く) 午前9:00~午後5:30
ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>