

アクセセル

※※【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと(使用上の注意の項参照)。

【形状・構造及び原理等】

以下の構成成分があり、記載の成分を含有します。

構成成分	性状	組成
アクセセル	液体	エタノール、水、芳香族スルフィン酸塩

【原理】

窩洞又は根管形成後の歯面を清掃し、接着阻害因子を除去する。

※※【使用目的又は効果】

窩洞又は根管形成後の歯面処理に用いる。

※※【使用方法等】

詳細は別途用意されている取扱説明書を必ず参照してください。

※※①窩洞又は根管の形成と清掃

通法による窩洞又は根管形成後は、十分に水洗し乾燥してください。

※※②アクセセル処理

アクセセルを筆等で、窩壁又は根管内壁に塗布し、塗布後5～10秒処理を行った後に乾燥してください。

※※③歯面処理

別売の「表面処理材グリーン」を窩壁又は根管内壁に塗布して、5～10秒処理を行ってください。処理後窩壁又は根管内壁を十分に水洗し乾燥します。使用にあたっては「添付文書」に従って行ってください。

④接着・充填・裏層

接着・充填・裏層にあたっては、各製品に付属の「添付文書」に従って行ってください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ※※1) 根管内のアクセセル乾燥時には、必ずバキュームを併用すること。
- 2) 使用後はすぐに各容器を閉栓すること。

【使用上の注意】

※※1) 使用注意

- ①他の製品と混合して使用しないこと。
- ②使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合は、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- ③アクセセルは可燃性である。火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ④アクセセルには揮発性の成分が含まれているので取扱中にこぼさないこと。高濃度の蒸気を多量に吸入すると頭痛等の恐れがあるので、十分な換気がなされている場所で使用すること。高濃度の蒸気を多量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材に対する過敏症の既往歴のある術者は、手袋等を用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起した場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ③口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。
- ④使用するにあたっては、患者の個人差も考慮し、症例に適合するかどうかを判断して使用すること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

※※【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・火気厳禁のこと。
- ・多湿、直射日光を避け、温度変化の少ない室温(1℃～30℃)で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期間】

本体に記載の使用期限*までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

※(例) ☐○○○○-△△は使用期限○○○○年△△月を示す。)

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者: サンメディカル株式会社

(本 社) 住 所: 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2

電話番号: 077-582-9980

フリーダイヤル: 0120-418-303 (FAX共通)

電話受付時間 月～金(祝日を除く)午前9:00～午後5:30

ホームページ: <http://www.sunmedical.co.jp>