



キレイキープは、無色透明のコーティングで 入れ歯のお手入れが **楽** になります！

コーティングしていない入れ歯

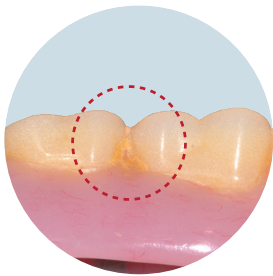


歯石が溜まっている


ブラシでは落とすきれない細菌が増殖し、固まって歯石になります。

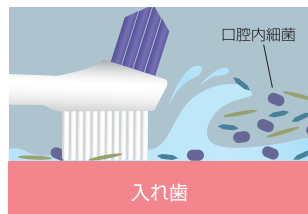


入れ歯

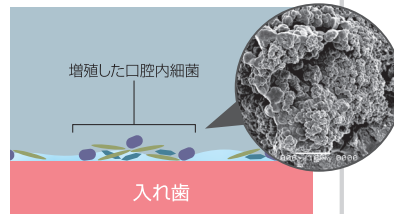

入れ歯

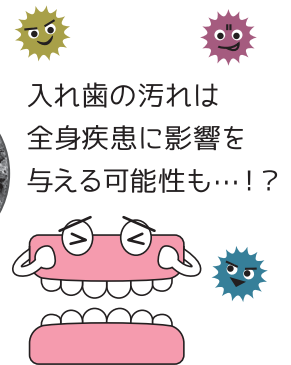


キレイキープでコーティングした入れ歯

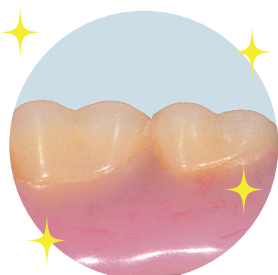

歯石が溜まりにくい

汚れがこびりつかず、歯石が溜まりにくくなります。

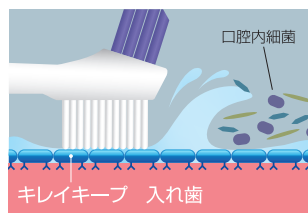


キレイキープ 入れ歯



入れ歯


コーティングすると
ニオイとヌメリが付き
にくくなります！

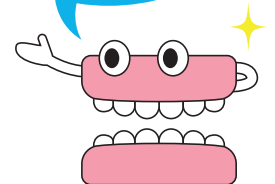


もちろん

入れ歯の内面も
細菌由来の汚れが
付きにくくなります！

※汚れを青色に染めています。

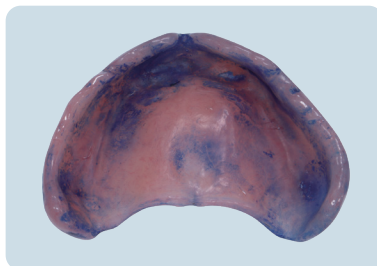

コーティングしていない入れ歯

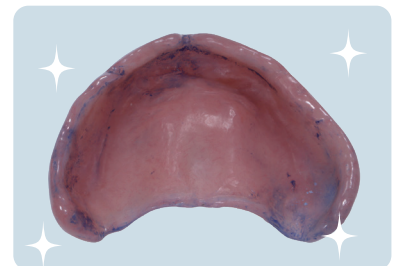


キレイキープでコーティングした入れ歯

入れ歯の状態によってはコーティングできない場合があります。

キレイを約3か月キープ！


ブラッシングに対するコーティング膜の耐久性

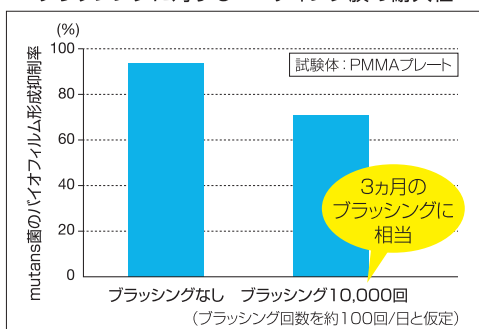


※サンメディカル社試験による

毎日ブラッシングや義歯洗浄剤で清掃しても、コーティング効果は約3か月※持続します。

※効果の持続期間は個人差があります。

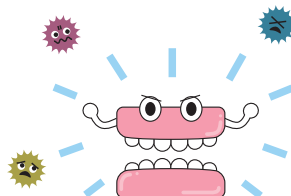


義歯洗浄剤に対するコーティング膜の耐久性

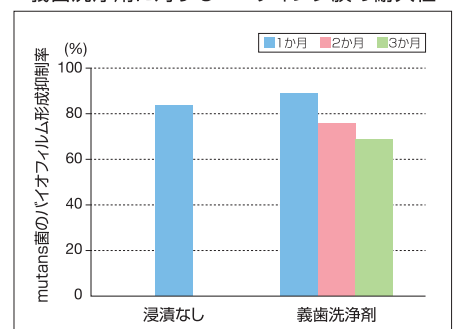

※サンメディカル社試験による

コーティングは10分程で完了!

ニオイなし・味なしの
うすい膜なので
口に入れても違和感なく
食事できます!

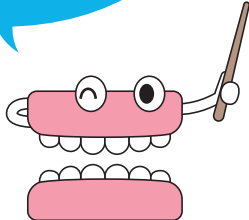

スプレーでコーティング成分を
吹き付ける



専用のライトを当てる

さらに

キレイキープの プラス効果

ブラシなどで清掃した義歯にキレイキープを
適用すると、スプレーの成分とライトの機能
により、さらにニオイやヌメリの原因を除去し
義歯を清潔にします。

エタノール
配合



UVC
(深紫外線)
照射

Light!



東京大学 大学院工学系研究科
石原 一彦教授



昭和大学 歯科補綴学講座
馬場 一美教授


キレイキープは

東京大学・石原一彦研究室が開発し、
昭和大学・歯科補綴学講座が応用研究した

「光反応性MPCポリマー」コーティングシステム!



日々のお手入れ

お家でのお手入れは
義歯ブラシや洗浄剤を
お使いください!

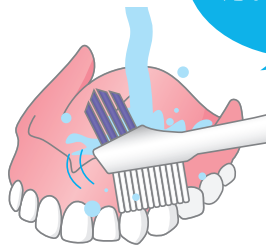

ブラッシング

軽い力で
汚れが落ちる

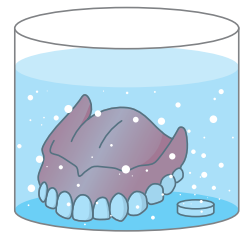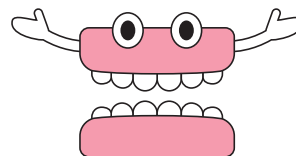

義歯洗浄剤