


1. 被着面の前処理


歯 面	修 復 物
 エナメル質 象牙質 ティースプライマー 塗布20秒後、乾燥。	 M&Cプライマー 金銀パラジウム合金 金合金 ポーセレン ジルコニア コンポジットレジン ニケイ酸リチウム* など A液とB液を1滴ずつ混合し、塗布後、乾燥。 ※ニケイ酸リチウムの場合は塗布30～60秒後乾燥。

2. 付属品の準備

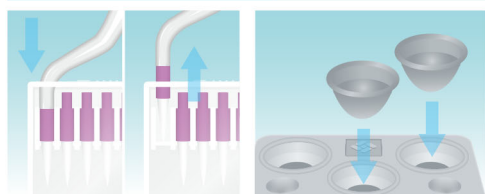


筆柄に筆積用ディスポチップを装着し、
ダッペンスタンドにディスポダッペンカップを2つ装着。

ディスポチップは必ず筆積用をご使用ください

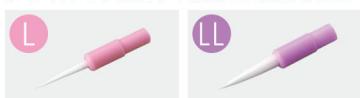

ディスポチップ筆積L(ピンク) ディスポチップ筆積LL(紫)

3. スーパーボンドEXの調製

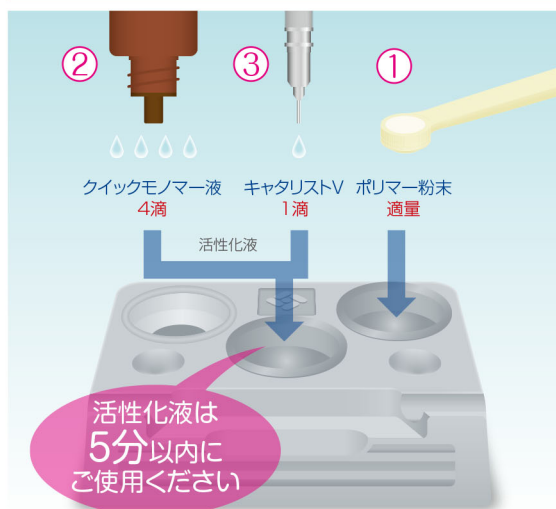

一方のカップに①ポリマー粉末を採取。もう一方のカップに②クイックモノマー液4滴と③キャタリストV 1滴を混合し、活性化液を調製。

硬化待ち時間

筆積操作後、咬合調整ができるまでの目安時間です。

硬化待ち時間

37℃

約5分




筆積法

動揺歯固定

操作方法の動画はこちら→



硬化待ち目安時間：5分

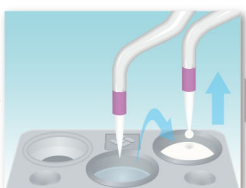前処理材の塗布・乾燥	ポリマー粉末・液材の採取	筆の浸漬とポリマー粉末の採取	スーパーボンドEXの塗布	硬化の確認・咬合調整・研磨						
 歯質 ティースプライマー 修復物 M&Cプライマー いずれも水洗は不要	 <table border="1"> <tr> <td>EXクリア</td> <td>適量</td> </tr> <tr> <td>クイックモノマー液</td> <td>4滴</td> </tr> <tr> <td>キャタリストV</td> <td>1滴</td> </tr> </table> 活性化液は使用直前に調製。 (活性化液は調製後、5分以内に使用する。)	EXクリア	適量	クイックモノマー液	4滴	キャタリストV	1滴	 筆の浸漬とポリマー粉末の採取 筆先に活性化液を十分に浸漬。 筆先1mmで円を描くように採取。	 スーパーボンドEXの塗布 十分に硬化するまで咬合せないようにする。	 硬化の確認・咬合調整・研磨 スーパーボンドEXを塗布して5分以上待ち、十分に硬化したことを確認。 その後、咬合調整・研磨。
EXクリア	適量									
クイックモノマー液	4滴									
キャタリストV	1滴									

完 成

ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。

歯科接着用レジネンメント スーパーボンドEX (管理医療機器) 医療機器認証番号 303AKBZX00055000
歯面処理材 ティースプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 222AFBZX00100000
歯科セラミックス用接着材料 M&Cプライマー (管理医療機器) 医療機器認証番号 231AFBZX00022000

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社 本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980
フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金 (祝日を除く) 午前9:00～午後5:30 ホームページ <http://www.sunmedical.co.jp>



1. 被着面の前処理

歯 面	修 復 物
 エナメル質 象牙質 ティースプライマー 塗布20秒後、乾燥。	 金銀パラジウム合金 金合金 ポーセレン ジルコニア コンポジットレジン ニケイ酸リチウム* など M&Cプライマー A液とB液を1滴ずつ混合し、塗布後、乾燥。 ※ニケイ酸リチウムの場合は塗布30～60秒後乾燥。

2. 準 備





ティスポッチは必ず
混和(青)をご使用ください



ティスポッチ混和(青)

ポリマー粉末の容器を軽く振ってから、計量スプーンで粉を軽くすりきる。

3. スーパーボンドEXの調製

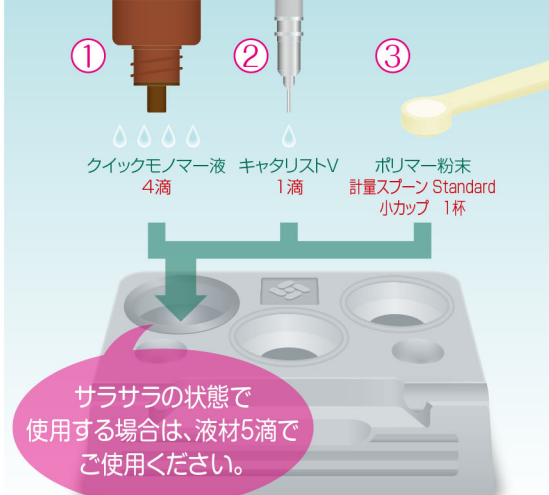

① クイックモノマー液 4滴
② キャタリストV 1滴
③ ポリマー粉末 計量スプーン Standard 小カップ 1杯

サラサラの状態で使用
する場合は、液材5滴で
ご使用ください。

カップに①クイックモノマー液4滴と②キャタリストV1滴を混合し、活性化液を調製。その後、③ポリマー粉末を投入し混和。

操作可能時間・硬化待ち時間

※1 操作可能時間は周辺の温度環境により異なります。 ※2 硬化待ち時間は、修復物装着後、咬合調整ができるまでの目安時間です。


粉液比			操作可能時間※1			硬化待ち時間※2
クイックモノマー液	キャタリストV	ポリマー粉末	21℃	23℃	25℃	37℃
4滴(標準比率)	1滴	Standard (1.0) 1杯	約100秒	約80秒	約70秒	約7分
5滴			約160秒	約100秒	約90秒	約10分



CAD/CAM冠の装着

操作方法の動画はこちら→



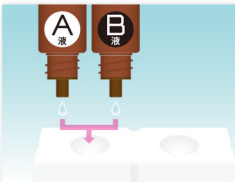

M&CプライマーのA液とB液を1滴ずつ混合



CAD/CAM冠の内面に混合液を塗布
水洗は不要




乾燥



支台歯に前処理材を塗布・乾燥

歯質	ティースプライマー
修復物	M&Cプライマー

いずれも水洗は不要

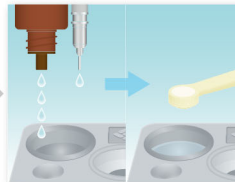


液材・ポリマー粉末の採取

クイックモノマー液	4滴
キャタリストV	1滴
EXティースカラー	1.0カップ

液材を採取し、ポリマー粉末は使用直前に投入。

硬化待ち目安時間：7分

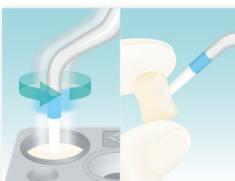

混和・混和泥の塗布
ポリマー粉末を投入後は手早く混和し、塗布。



CAD/CAM冠の圧接・保持



余剰セメントの除去
余剰セメントが硬化するまでに除去を完了。



加圧・硬化待ち
十分に硬化したことを確認し、咬合調整。

完 成

その他の修復物も同じ操作ステップでご使用いただけます。
ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。