

歯科材料03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用分離材 70923000

ウォッシュャブル セツプ

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと(使用上の注意の項参照)。

【形状・構造及び原理等】

以下の構成成分があり、記載の成分を含有します。

| 構成成分 | 性状 | 組成 |
|--------------|----|-------------------|
| ウォッシュャブル セツプ | 液体 | エタノール、水溶性ポリマー、その他 |

【原理】

本品を塗布することにより水溶性ポリマーの被膜が形成され、レジン系材料との分離性を高める。

【使用目的又は効果】

1) 使用目的

天然歯、金属、セラミックス、またはレジンなどの面と歯科材料の分離、または歯科材料間の分離のために用いる。

2) 使用用途

1. 合着時の余剰レジンと隣在歯や補綴物表面の分離
2. レジン系材料*で処置した内側性窩洞とレジン系仮封材の分離
※レジン系裏層材、レジン系コーティング材、コンポジットレジン

【使用方法等】

1) 被膜の形成

①塗布

筆などを用いて、分離させたい部位に均一に塗布します。

②乾燥

まず、弱いエアブローにより塗膜面を均一にします(目安15秒)。

次に、強いエアブローにより乾燥させ被膜状にします(目安15秒)。

さらに分離効果を高めたい場合は、①②の操作を繰り返して厚めの被膜を形成します。

2) 使用後の被膜除去

使用後は、被膜の色が見えなくなるまで水洗するか、水洗だけで除去し難い場合は、水に浸した綿球で擦りながら除去を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 使用後はすぐに閉栓すること。
- 2) 使用後の筆は水で洗浄すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①他の製品と混合して使用しないこと。
- ②可燃性である。火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ③使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合は、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- ④分離効果を必要とする箇所以外に塗布しないこと。特に接着面に塗布しないように注意すること。誤って接着面に塗布した場合は、水洗して除去すること。
- ⑤レジン支台歯(外側性窩洞レジンコーティング面含む)と即重レジンとの分離には、効果が不十分な場合があるので適用しないこと。
- ⑥揮発成分を含むため、採取後は速やかに使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材に対する過敏症の既往歴のある術者は、手袋等を用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起した場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ③口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐにアルコール綿などで拭いた後、多量の流水で洗浄すること。万一、目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。

④使用するにあたっては、患者の個人差も考慮し、症例に適合するかどうかを判断して使用すること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・火気厳禁のこと。
- ・多湿、直射日光を避け、室温にて保管すること。
- ・冷蔵庫では保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

3年

【使用期間】

本体に記載の使用期限*までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]

※(例) □○○○○-△△は使用期限○○○○年△△月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンメディカル株式会社

(本 社) 住 所：〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2

電話番号：077-582-9980

フリーダイヤル：0120-418-303(FAX共通)

電話受付時間 月～金(祝日を除く)午前9:00～午後5:30

ホームページ：<http://www.sunmedical.co.jp>