

# スーパーボンド 筆洗い液Ⅱ

Super-Bond BRUSH CLEANER Ⅱ



スーパーボンド 筆洗い液Ⅱ  
標準価格 ¥2,300

■製品構成

- ①筆洗い液Ⅱ .....1本(100mL)
- ②洗浄用ポット .....1個
- ③ワンタッチキャップ(白) .....1個

## ■さらに使いやすく

スーパーボンド 筆洗い液Ⅱは、従来の洗浄力そのままに「洗浄用ポット」と「ワンタッチキャップ」を採用し、使いやすさが向上しました。

### 洗浄用ポット



#### 洗浄性がアップ!

(筆に付着したレジンがフィルターを通してボトルに沈殿し、分離できます)


※ミニサンプルには付属しておりません。

### ワンタッチキャップ



ワンタッチで開閉でき、注ぎやすい!


## 使用方法

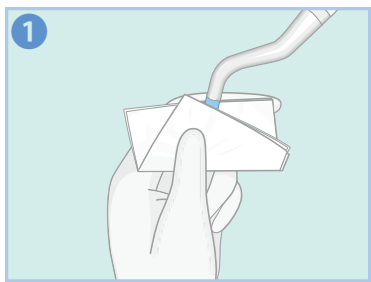


1 筆先に残ったスーパーボンドが完全に硬化する前に、ガーゼまたはティッシュで拭き取る。




2 ボトルにフィルターをセットする。

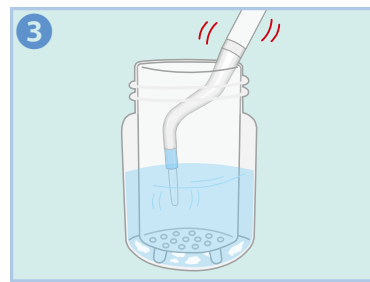

3 筆洗い液IIを注入し、筆を洗浄する。

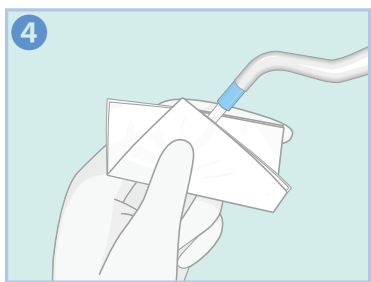

4 軟化したスーパーボンドをガーゼまたはティッシュで拭き取る。

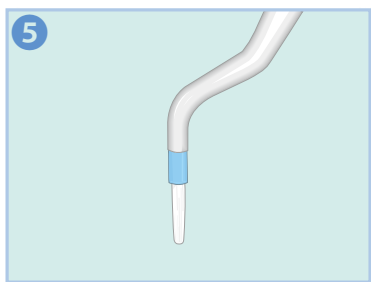

5 毛先を整え、乾燥して保管する。

### 筆洗い液II 使用の注意事項

- スーパーボンドの硬化が進むと除去が困難になります。可能な限り、硬化前に拭き取ってください。スーパーボンドが完全に硬化した場合は、ティスポテップを廃棄してください。
- ティスポテップは長時間浸漬すると毛先が抜けることがありますので、つけ置き洗いは避けてください。

### 洗浄用ポット 使用の注意事項

- ボトルに筆洗い液IIが入った状態でフィルターをセットすると、液があふれることがありますのでご注意ください。
- 筆洗い液IIが少なくなったり溶解性が悪くなった場合は、残った液を廃棄し、新しい液に入れ替えてください。

## 注意事項

成分：アセトン、メタクリル酸メチル



### 危険

#### ●危険有害性情報

- 引火性の高い液体及び蒸気
- 眼刺激
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 眠気及びめまいのおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 長期又は反復ばく露による血液の障害のおそれ
- 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ

火気厳禁 第四類 第一石油類 危険等級II

### 【禁忌・禁止】

メタクリル酸メチル、アセトンに対して発疹、皮膚炎などの既往歴のある者は使用しないこと。

### 貯蔵または取扱い上の注意事項

- 火気
  - 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
- 吸入
  - 十分な換気がなされている場所で使用すること。
  - 取り扱い中にこぼさないこと。
  - 多量に吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動すること。
- 付着
  - 必要に応じて保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用し、皮膚に付着させないこと。
  - 皮膚に付着した場合は、多量の水と石鹸で洗うこと。
  - 眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗うこと。
  - 眼の刺激が続く場合は、眼科医の診断を受けること。
- 保管場所
  - 容器を密栓して涼しく換気の良いところで保管すること。
  - 長期間使用しない時はワンタッチキャップ(白)をはずし、密栓キャップを装着し保管すること。

■ご使用に際しては、必ずこの「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2012年10月22日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

**サンメディカル株式会社**

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎ 077(582)9980

スーパーボンド 筆洗い液IIの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ →



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30